





JETZT ANSEHEN  
auf YouTube!

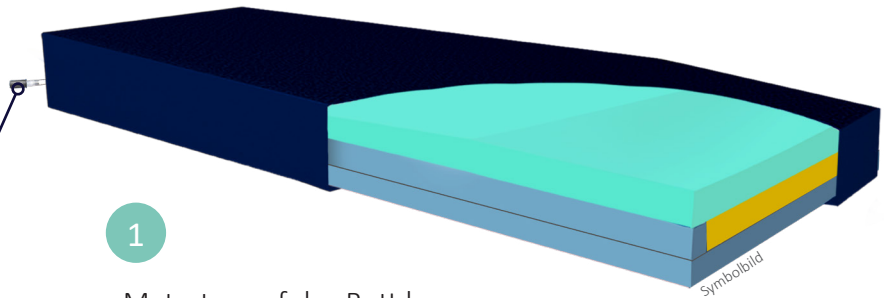

1

Matratze auf das Bett legen.  
Bitte beachten Sie den Aufdruck  
„THIS SIDE UP“.

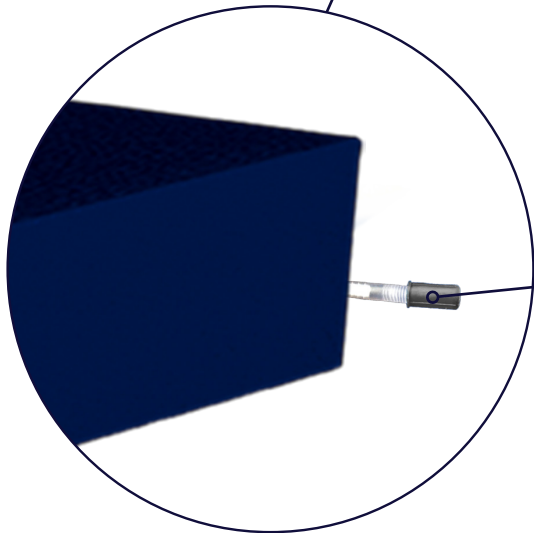

2

Ventil durch Ziehen öffnen und  
ca. 5 Minuten warten, bis sich  
die Luftzellen selbstständig  
aufgeblasen haben.

*(Ventilkappe kann nicht herunterfallen.)*

3

Ventil durch  
Drücken schließen.

4

Legen Sie den Patienten auf die  
Matratze. Öffnen Sie vorsichtig das  
Ventil durch Ziehen der grauen Kappe,  
damit Luft entweicht und führen Sie  
gleichzeitig einen Fingertest\* durch.

*\*Führen Sie eine Hand unter das Gesäß. Der  
optimale Liegekomfort ist erreicht, wenn nur  
noch eine geringe Fingerbewegung von  
1 – 2,5 cm möglich ist.*

5

Ventil durch  
Drücken schließen.

6

Tägliche Überprüfung der richtigen  
Befüllung der Luftkammern wird  
empfohlen, ggf. ist eine Anpassung  
notwendig.