



# KATALOG DEKUBITUSTHERAPIE

KLINIK-SORTIMENT



Produkte für mehr  
**Nachhaltigkeit!**

Scan me!



Hier gelangen Sie zur  
aktuellen Online-Version.

Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.



<b>1.</b>	<b>ÜBER DIE FUNKE MEDICAL GMBH</b>	<b>5 – 10</b>
	Firmenportrait	7
	Ökologische Verantwortung	8
	Zertifizierungen	9
<b>2.</b>	<b>PRODUKTEIGENSCHAFTEN</b>	<b>11 – 14</b>
	Klinik-Sortiment	13
	Eigenschaften der Pflegematratten	14
<b>3.</b>	<b>PRODUKTE</b>	<b>15 – 58</b>
	GREENLINE <sup>®</sup>	17
	CLINIC CARE	23
	EVAQ <sup>®</sup>	29
	BARIATRIC CARE	37
	AIRLINE <sup>®</sup>	43
	MEMOLINE <sup>®</sup>	49
	CLINIC CARE	51
	EVAQ <sup>®</sup>	53
	Positionierungshilfen	55 – 88
	Positionierungskissen	59
	Fersenfreilagerungsschuh	83
	Umlager- und Wendehilfe	85
<b>4.</b>	<b>SERVICES</b>	<b>89 – 97</b>

# INHALT



Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.



# ÜBER DIE FUNKE MEDICAL GMBH



Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.

# Firmenportrait



## Funke Medical GmbH – seit 1988

Die Funke Medical GmbH ist ein deutsches Unternehmen, welches hochwertige medizinische Liege-, Sitz- und Lagerungssysteme herstellt. Die Produktion erfolgt an drei Standorten, mit 17.800m<sup>2</sup> Produktionsfläche, im nordrhein-westfälischen Raesfeld. Somit erfolgt die Herstellung der Produkte ausschließlich in Deutschland.

Die Funke Medical GmbH ist Marktführer im Bereich Dekubitusprophylaxe und –therapie in der häuslichen Pflege in Deutschland. Sie ist ein international agierendes Unternehmen, welches bereits über langjährige Geschäftsbeziehungen mit über 1.400 Kunden aus dem Bereich Medizinfachhandel und Kliniken im In- und Ausland verfügt.

Sie möchten gerne Näheres zu unserem Unternehmen und unserer Produktpalette erfahren? Kein Problem! Ob per E-Mail, telefonisch oder auch persönlich – die Mitarbeiter der Funke Medical GmbH stehen Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Weitere Informationen unter [klinikmatratze.de](http://klinikmatratze.de)!

Herzlichst die Geschäftsführung

Dr. Ramona König (CEO), Helmut Wessels, Christian Maruhn



Verwaltung und Produktionsstätte



Logistik- und Dienstleistungszentrum



Verwaltung und Produktionsstätte



# Ökologische Verantwortung

Umwelt- und Klimaschutz liegen uns sehr am Herzen. Aus diesem Grund legen wir großen Wert auf ressourcenschonende Prozesse, um unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Um nachhaltiger zu werden, haben wir folgende Maßnahmen ergriffen:



## Photovoltaik

Seit 2012 produzieren wir mit 4 Photovoltaikanlagen 250.000 kWh Strom aus Sonnenenergie. Damit decken wir 65% des eigenen Strombedarfs. Dies bedeutet, dass durch die Stromgewinnung für unsere Produktion ca. 130 Tonnen weniger CO<sub>2</sub> pro Jahr in die Umwelt ausgestoßen werden.



## Klimafreundliche Matratzen

Unsere GREENLINE®-Matratzen werden aus ECOLAST®-Schaum hergestellt und haben im Vergleich zu herkömmlichen Dekubitustherapie-Matratzen (*Weichlagerungsmatratzen aus Schaumstoff/Wechseldruckmatratzen*) eine ca. 22%\* geringere CO<sub>2</sub>-Emission.



## Nachhaltige Verpackung

Unsere Sitzkissenkartons/HEEL PROTECT®-Kartons bestehen aus Graspapier. Dabei handelt es sich um einen schnellwachsenden, nachhaltigen Rohstoff. Das für die Produktion verwendete Gras stammt von bisher nicht genutzter Grünflächen, sogenannten Ausgleichsflächen. Sie werden zudem lediglich einmal zu Beginn und einmal am Ende des Jahres gemäht, sodass die Hauptvegetationszeiten der Gräser nicht beeinflusst werden.



### Wassersparnis:

Während der Herstellung von Graspapier wird deutlich weniger Wasser benötigt als für Frischfaserzellstoff aus Holz oder die Aufbereitung von Altpapier.



### CO<sub>2</sub> Ersparnis:

Graspapier verursacht, im Vergleich zu Frischfaserzellstoff aus Holz, bedeutend weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen.



### Ressourcenschonend:

Minimierung des Verbrauches von wichtigen Ressourcen wie Holz.



### Biologisch abbaubar:

Graspapier besteht aus Naturfasern, welche biologisch abbaubar sind. Die verwendeten Flexo-Farben sind wasserlöslich, unbedenklich und können mit dem Karton recycelt werden.



## Einsparung von Plastik

Zusätzlich werden die Sitzkissen und HEEL PROTECT® mit einem Frischesiegel, statt einer zusätzlichen Folie versehen. Dadurch sparen wir jährlich 6 Tonnen Folie ein.

Wir möchten mit all diesen Maßnahmen die technische Basis für einen umweltschonenden Umgang mit unseren Ressourcen legen, um unserer ökologischen Verantwortung gerecht zu werden.

**THE WORLD IS A FINE PLACE  
AND WORTH FIGHTING FOR.**

# Zertifizierungen

Durch die Zertifizierung nach DIN EN ISO 13485 hat die Funke Medical GmbH die Berechtigung Medizinprodukte herzustellen und nach den einschlägigen Gesetzen in den Verkehr zu bringen. Diese Qualitätsmanagement-Systeme werden regelmäßig durch externe Zertifizierungsgesellschaften überprüft und zertifiziert und zudem behördlich überwacht. Dadurch entwickelt sich das Unternehmen ständig weiter.

Intern wird die Qualität durch einen Qualitätsmanagementbeauftragten, einen Sicherheitsbeauftragten und eine Qualified Person gemäß MDR 2017/745 überwacht.

Die Funke Medical GmbH zeichnet sich durch ihre herausragende medizinische Kompetenz, kontinuierliche hohe Qualität und zuverlässige Lieferfähigkeit aus.

Zertifiziertes  
Qualitätsmanagementsystem  
nach DIN EN ISO 13485



Zugelassener Hersteller  
von CE-ausgezeichneten  
Medizinprodukten im Sinne  
der MDR 2017/745



Klinische Bewertung  
gemäß MEDDEV 2.7.1



Nachverfolgbarkeit aller  
Produkte mit Hilfe des  
UDI-Codes



Laborstudien:  
Mikroklima, Druckentlastung,  
Schwerentflammbarkeit,  
Biokompatibilität



Qualitätsmanagement

[qm@funke-medical.de](mailto:qm@funke-medical.de)

+49-2865-2669350

Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.



# PRODUKT- EIGENSCHAFTEN



Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.



# Klinik-Sortiment

Alle Funke Medical Dekubitustherapie-Matratzen des **Klinik-Sortiments** zeichnen sich durch ihre hochwertige Qualität und vielseitige Einsetzbarkeit aus.

Pflegebettmatratzen  
für alle Einsatzbereiche

- ✓ Normalstation
- ✓ Geriatrie
- ✓ Intensivstation
- ✓ Langliegerstation

Hochwertige  
Dekubitustherapie-Matratzen



Evakuierungsmatratzen



- Your **all-in-one** solution -

Mehr Informationen auf den Seiten 29 – 32

BARIATRIC CARE



Mehr Informationen auf den Seiten 37 – 42

Klimaschonende Matratzen



[funke-medical.de/greenline](https://funke-medical.de/greenline)

Mehr Informationen auf den Seiten 17 – 21

Hyper AIR® hybrid



Dekubitustherapie-Luftzellen-Matratze

Mehr Informationen auf den Seiten 45 und 46



## Eigenschaften der Pflegebettmatratzen Klinik-Sortiment

- |   |  |  |
|---|--|--|
| Effiziente Dekubitustherapie und-prophylaxe             | Hochwertiger Inkontinenzbezug abnehmbar per Reißverschluss                     | CE-Kennzeichnung MDR 2017/745                                      |
| Hervorragender Nutzen                                   | Waschbar bis 95°C  | Schwer entflammbar <small>DIN EN 597 (Teil 1+2)</small>            |
| Hoher Komfort für Patienten                             | Wischdesinfizierbar  | Zur Desinfektion mit Chlor geeignet <small>(max. 5000 ppm)</small> |
| Geeignet zur Schmerzlinderung durch Entlastungslagerung | Desinfektionsmittel-beständig  | Biokompatibel  |
| Lange Garantiezeiten                                    | Autoklavierbar   | Wartungsfrei   |
| Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit                   | Offenporiges atmungsaktives Material = optimales Mikroklima                    | Kein Ausfallrisiko   |
| Hervorragende Druckentlastung                           | Bezugsmaterial viren- und bakterien-dicht <small>gem. ASTM 1670 + 1671</small> | Ökonomisch   |
| Ultraschall verschweißte Nähte                          | Wasserdicht dennoch atmungsaktiv   | Hergestellt in Deutschland   |
| Randzonenverstärkung                                    | Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte                           | Klimafreundlich  |
| Reißverschluss-überdeckung                              |  |  |



### Zusätzliche Eigenschaften der GREENLINE<sup>®</sup>-Matratzen

- Größere Langlebigkeit dank **ECOLAST<sup>®</sup>**-Schaum
- Längere Garantiezeiten
- Ca. 22% weniger CO<sub>2</sub> pro Matratze

Mehr Informationen auf den Seiten 17 – 21



### Zusätzliche Eigenschaften der EVAQ<sup>®</sup>-Matratzen

- Gleitfähige Unterseite
- 10 sichere Bergegriffe für ein einfacheres Handling
- Sicherheitsgurte mit Schnellverschluss

Mehr Informationen auf den Seiten 29 – 32



# PRODUKTE



Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.

# GREENLINE<sup>©</sup> – RESPONSIBLE CARE



Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.

# — GREENLINE<sup>©</sup> —



RESPONSIBLE CARE

## ECOLAST<sup>®</sup>-Schaum

Medizinische Qualität trifft Öko 4.0

ca. **22 %**<sup>\*</sup>  
**weniger CO<sub>2</sub>**

ca. 7,2kg weniger CO<sub>2</sub> pro Matratze

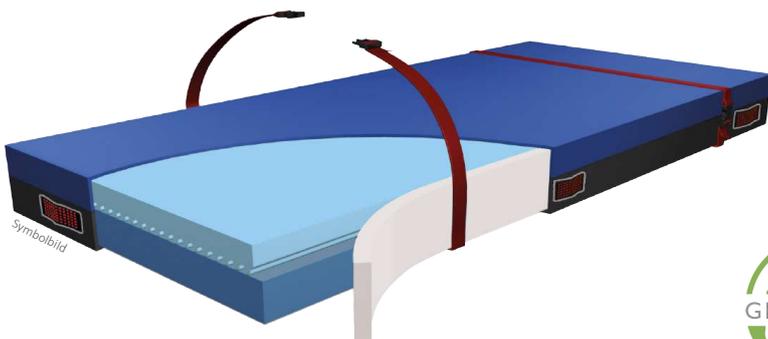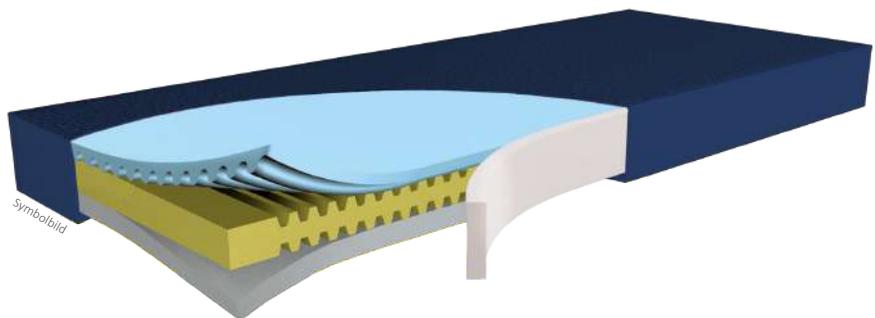


Leisten Sie Ihren Beitrag  
zum KLIMASCHUTZ!



GREENLINE<sup>®</sup>-Matratzen haben im Vergleich zu herkömmlichen Dekubitustherapie-Matratzen (Weichlagerungs-Schaummatratzen/Wechseldruckmatratzen) eine verminderte CO<sub>2</sub>-Emission.

\*Quelle: Europur-Studie 2015

## Weichlagerungsmatratten aus Schaumstoff

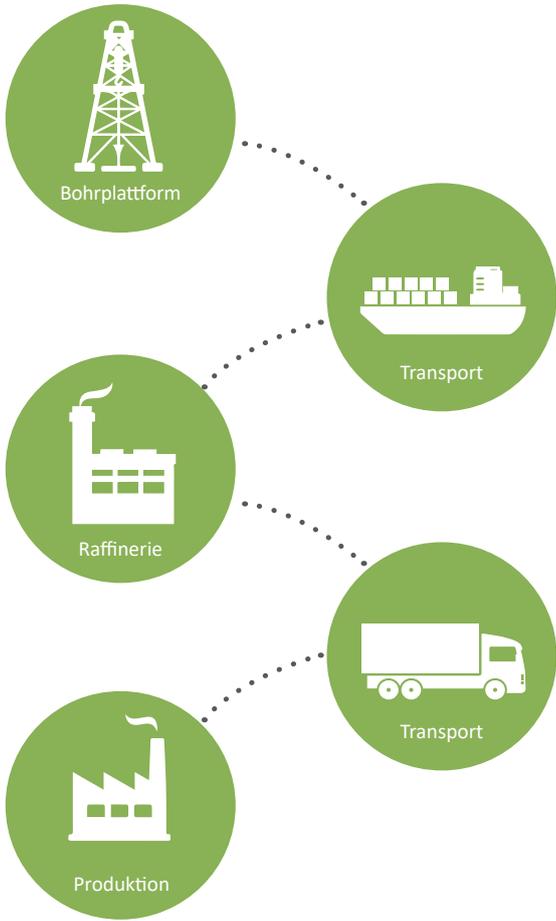


1 kg Schaum = 3 kg CO<sub>2</sub>

Herkömmliche Weichlagerungsmatratten aus Schaumstoff:




11 kg Schaum  
= 33 kg CO<sub>2</sub>

— GREENLINE<sup>©</sup> —

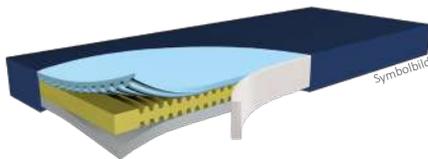

8,6 kg Schaum  
= 25,8 kg CO<sub>2</sub>

## Wechseldruckmatratten

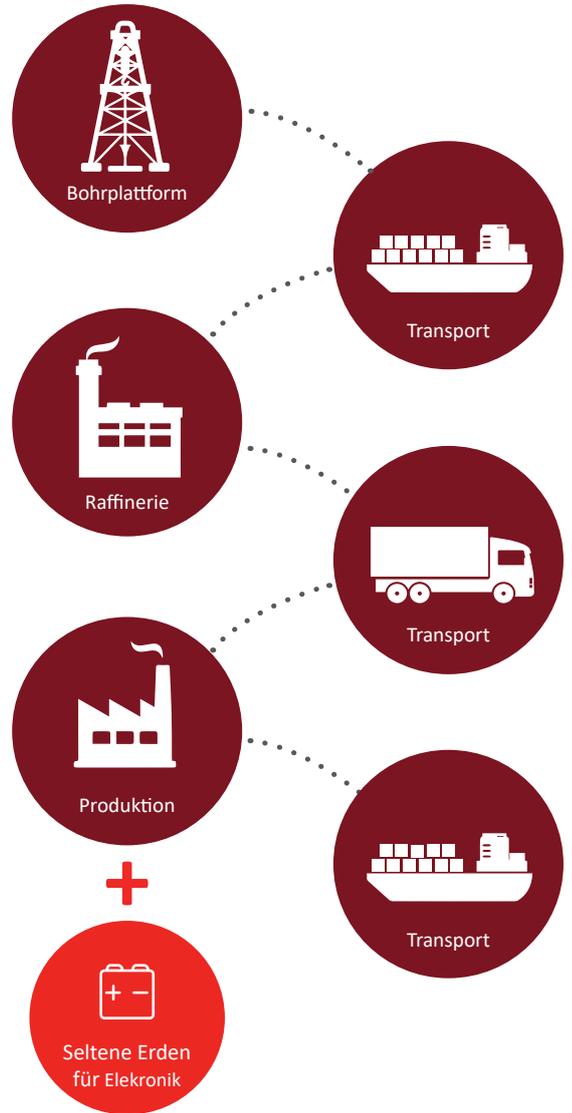

1 kg Plastik = 3,5 kg CO<sub>2</sub>



10 kg Plastik  
= 35 kg CO<sub>2</sub>  
+ seltene Erden  
+ permanenter Stromverbrauch


# ECOLAST® – Technische Vorteile

GREENLINE®-Matratzen werden aus ECOLAST®-Schaum hergestellt und haben im Vergleich zu herkömmlichen Dekubitustherapie-Matratzen (*Weichlagerungsmatratzen aus Schaumstoff/Wechseldruckmatratzen*) eine verminderte CO<sub>2</sub>-Emission.


ECOLAST®-Schaum ist ein speziell entwickelter Hybridschaumstoff. Im Vergleich zu Standardschaumstoff sorgt die offenere Zellstruktur für eine verbesserte Luftzirkulation, damit der Patient von einem optimalen Mikroklima profitiert.

ECOLAST®-Schaum bietet eine perfekte Druckentlastung und eine vielfach verbesserte Haltbarkeit.


Härteverlust durch Einfluss von Luftfeuchtigkeit  
(35°C, 95% RH\*<sup>1</sup>)

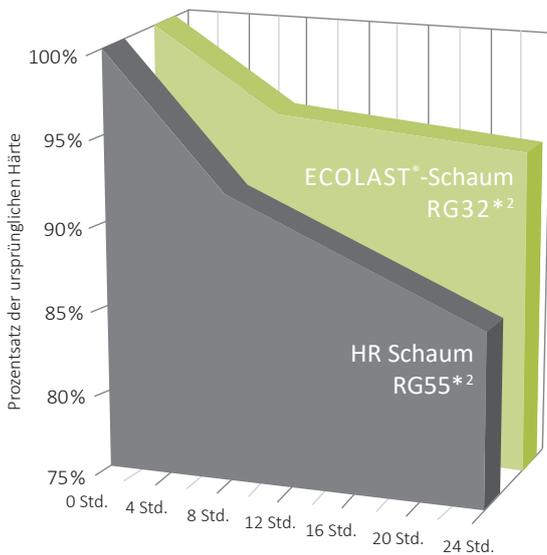

CO<sub>2</sub> Emission pro m<sup>3</sup> in kg\*<sup>3</sup>

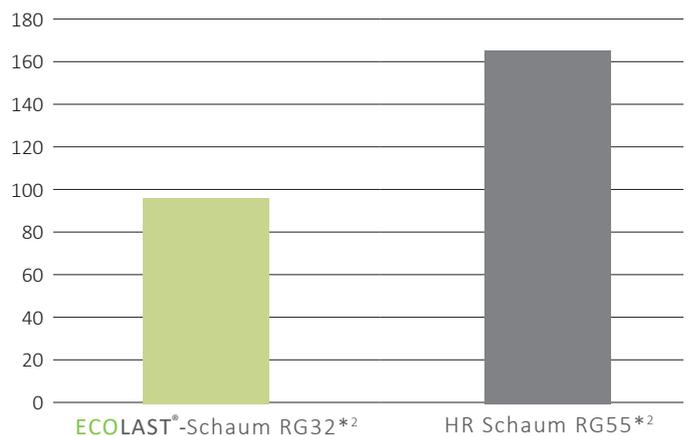

Capability emission figure\*<sup>4</sup>

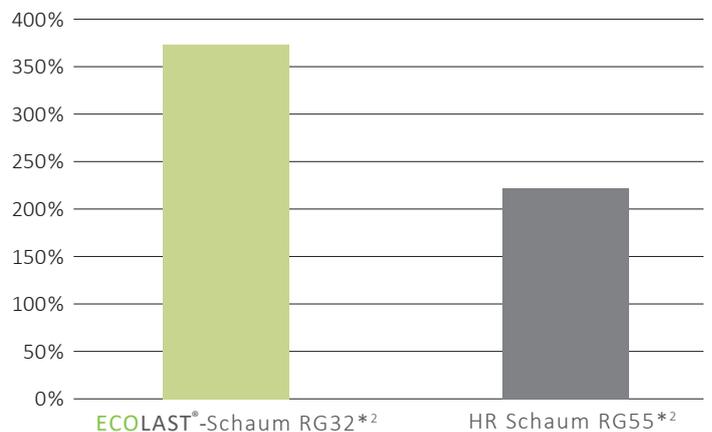

\*<sup>1</sup> RH = relative Luftfeuchtigkeit

\*<sup>2</sup> RG = Raumgewicht (kg/m<sup>3</sup>)

\*<sup>3</sup> Quelle: Europur-Studie 2015

\*<sup>4</sup> Im Vergleich:

Elastizitäts-Test ASTM D3574/H • Wet-Compression-Test ASTM D395 • Bruchdehnung ISO 1798 • Zugfestigkeit ISO 1798 • CO<sub>2</sub> Emissionswert

Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.

# GREENLINE<sup>©</sup>




CLINIC CARE

Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.

# — GREENLINE<sup>®</sup> —

RESPONSIBLE CARE

## ECOLAST<sup>®</sup> - Schaum-Technologie

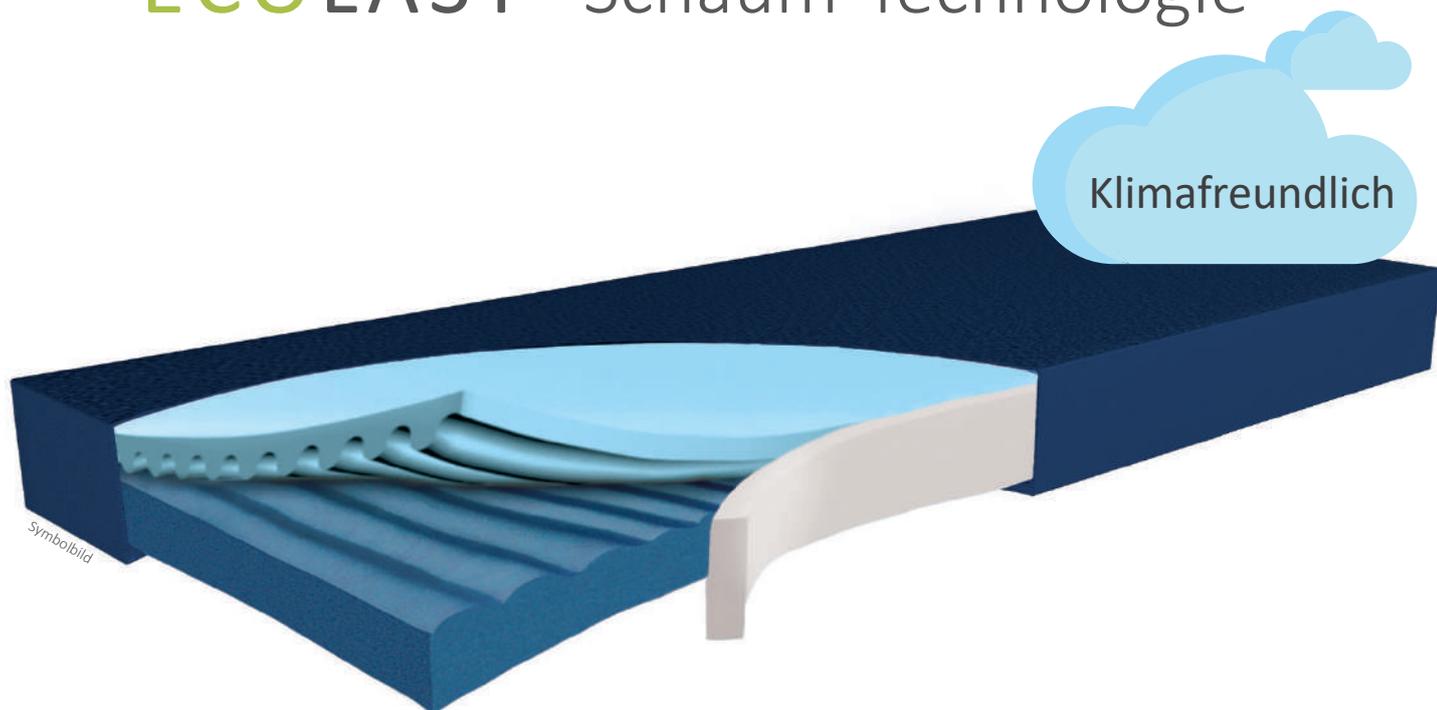

## Hyper Foam PLUS *clinic*

— GREENLINE<sup>®</sup> —

Mehr Informationen über GREENLINE<sup>®</sup> finden Sie auf den Seiten 17 – 21

Überreicht durch:

**PRS**   
Pressure Relieving Solutions



Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung  
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 3  
(nach Prof. Seiler / EPUAP)


Mittleres Risiko  
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

# Hyper Foam PLUS *clinic*

GREENLINE®

Dekubitustherapie-Matratze

**5** JAHRE GARANTIE <sup>\*1</sup>

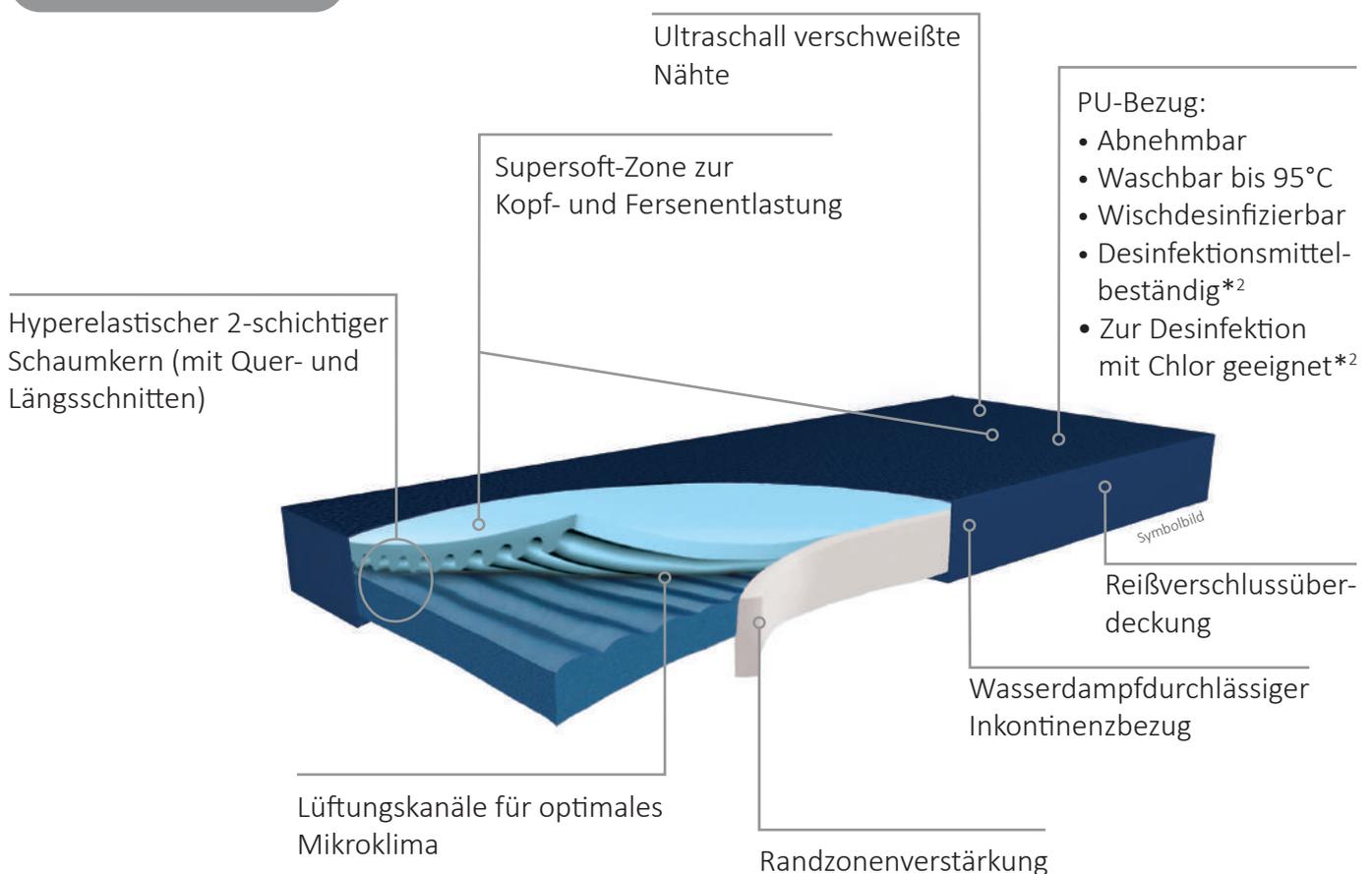

Größe

Höhe	14 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE®

ECOLAST®-Schaum-Technologie:

- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen



Offener atmungsaktiver ECOLAST®-Schaum



Autoklavierbar



Bezugsmaterial viren- und bakterien-dicht gem. ASTM 1670 + 1671



Wasserdicht dennoch atmungsaktiv



Druckentlastung < 18 mmHg



Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte



CE-Kennzeichnung MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer entflammbar DIN EN 597 (1+2)



Max. 5000 ppm



Patientengewicht: 0 bis 140 kg

\*<sup>1</sup> Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!


\*<sup>2</sup> Details siehe Gebrauchsanweisung.

# — GREENLINE<sup>®</sup> —

RESPONSIBLE CARE

## ECOLAST<sup>®</sup> - Schaum-Technologie

ca. 22 %\*  
weniger CO<sub>2</sub>

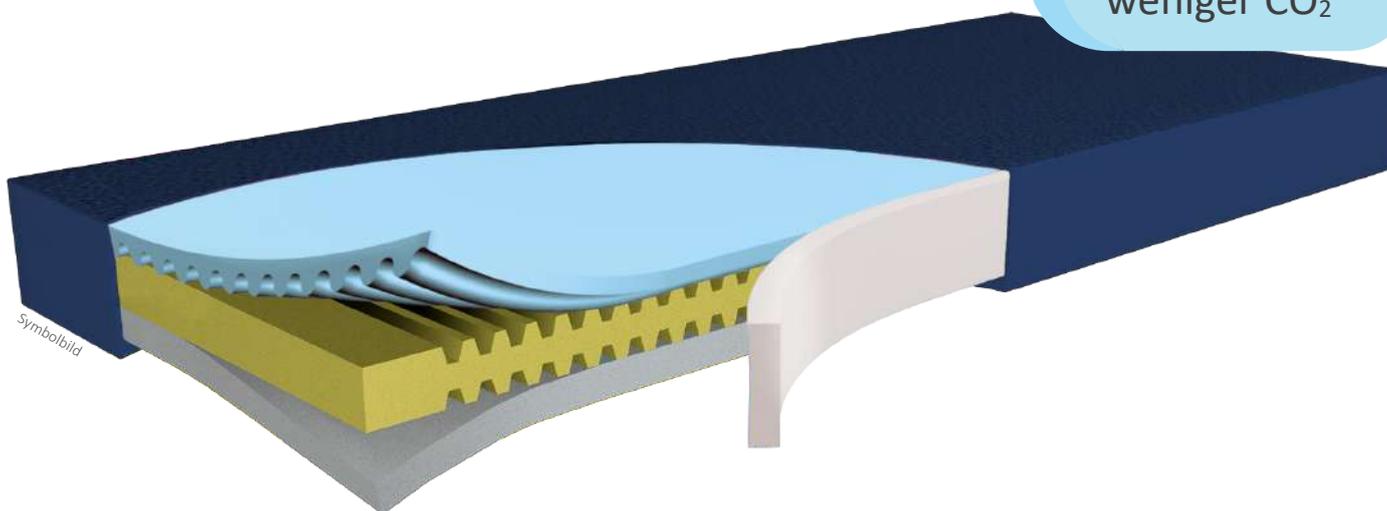

## Hyper Foam 2 *clinic*

— GREENLINE<sup>®</sup> —

Mehr Informationen über  
GREENLINE<sup>®</sup> finden Sie auf  
den Seiten 17 – 21

Überreicht durch:

**PRS**   
Pressure Relieving Solutions



\*ca. 7,2kg weniger CO<sub>2</sub> pro Matratze (Quelle: Europur-Studie 2015)

Funke Medical GmbH • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-2669350 • Fax: +49-2865-8133 • info@funke-medical.de

Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung  
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 4  
(nach Prof. Seiler / EPUAP)


Sehr hohes Risiko  
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

# Hyper Foam 2<sup>clinic</sup>

GREENLINE®

Dekubitustherapie-Matratze

**7** JAHRE  
GARANTIE <sup>\*1</sup>

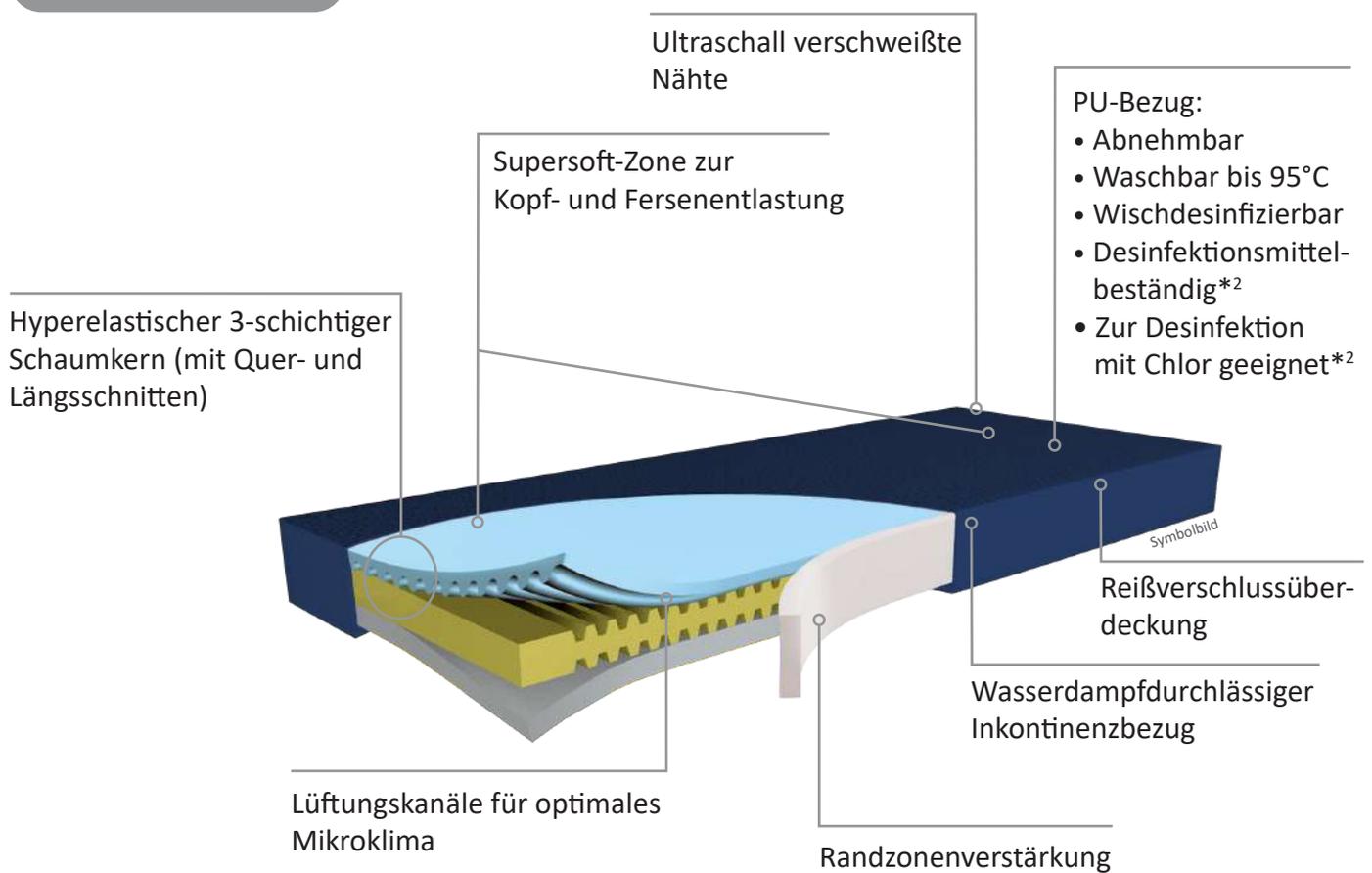

Größe

Höhe	15 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE®

ECOLAST®-Schaum-Technologie:

- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen



Offenporiger atmungsaktiver ECOLAST®-Schaum	Autoklavierbar	Bezugsmaterial viren- und bakterien-dicht gem. ASTM 1670 + 1671	Wasserdicht dennoch atmungsaktiv	Druckentlastung < 18 mmHg	Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte	CE-Kennzeichnung MDR 2017/745	Wartungsfrei	Schwer entflammbar DIN EN 597 (1+2)	Max. 5000 ppm	Patientengewicht: 0 bis 150 kg


\*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

\*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

## Dekubitustherapie-Matratzen mit Evakuierungsfunktion

evAQ<sup>®</sup>

- Your **all-in-one** solution -

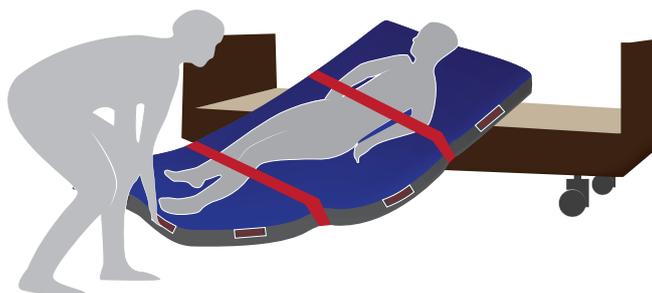



# Dekubitustherapie-Matratzen mit Evakuierungsfunktion

- Your **all-in-one** solution-

Im Brandfall hat man nur **3 Minuten** Zeit um zu entkommen!



Die EVAQ®-Dekubitustherapie-Matratzen sind mit einer Evakuierungsfunktion ausgerüstet.  
Patienten können im Brandfall durch nur eine Person evakuiert werden.

Die Dauer pro Stockwerk liegt unter **60 Sekunden**.

Überzeugen Sie sich selbst, indem Sie unseren Film ansehen.

Scan me!



FILMLINK



Schauen Sie sich hier  
den Evakuierungsfilm an!



- Your **all-in-one** solution -

# Gegenüberstellung – Ausstattung von Einrichtungen

(z.B. Kliniken, Altenheimen)

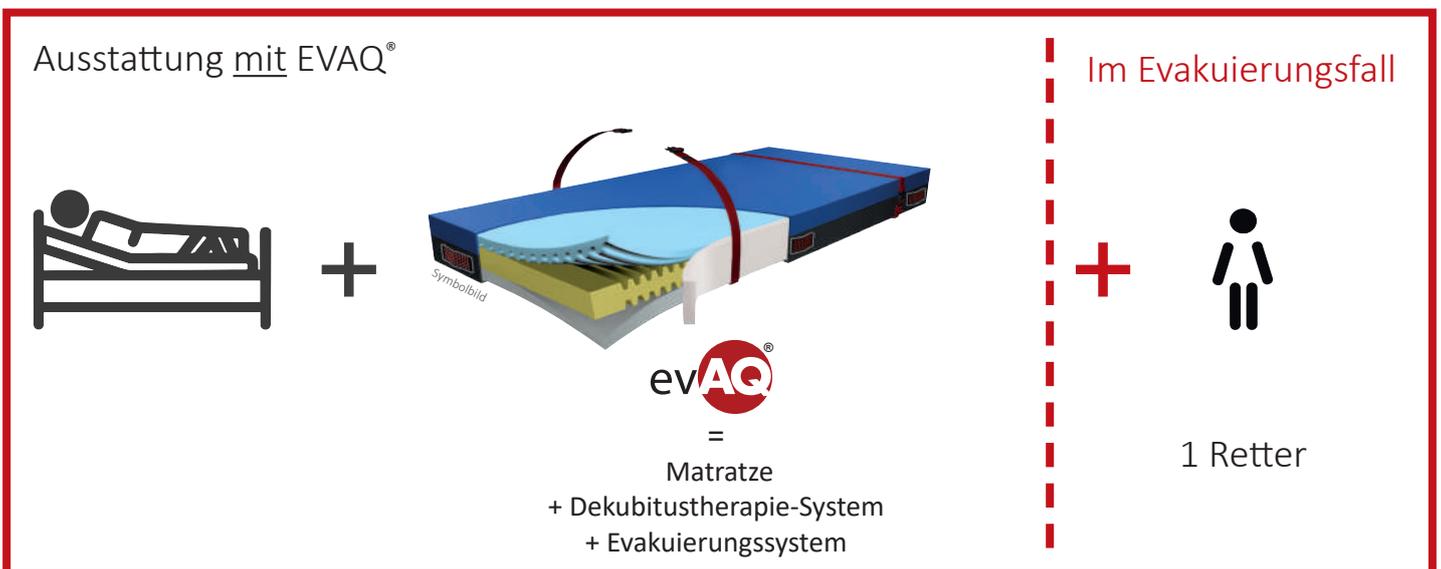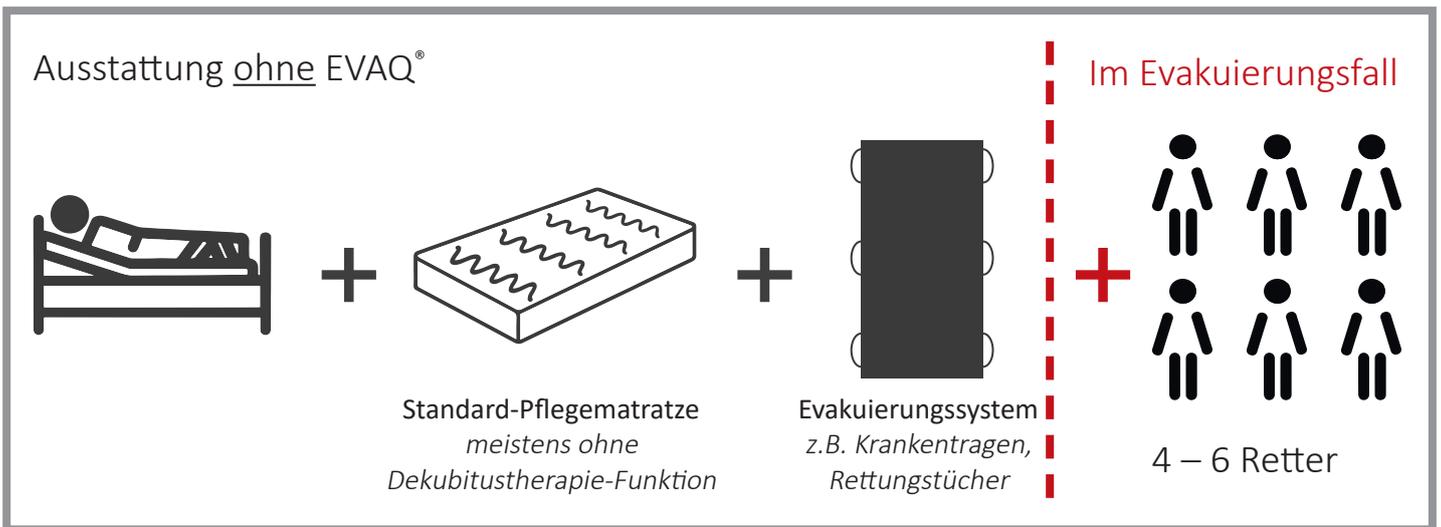

**Ressourcen-Ersparnis** (Geld und Personal)!



## Dekubitustherapie-Matratten mit Evakuierungsfunktion

Alle Matratzen dieses Programmes sind mit einer Evakuierungsfunktion ausgerüstet. Diese ermöglicht Ihnen die schnelle und problemlose Evakuierung der Patienten ohne eine Umbettung auf Bergetücher oder Tragen!


Bei Evakuierungssystemen wie Tragen und Bergetücher benötigen sie oftmals zwei oder mehr Personen zur Durchführung.

Bei der Verwendung der EVAQ®-Dekubitustherapie-Matratten können Sie eine schonende Evakuierung, auch über Treppen, mit nur einer Person vornehmen!

§§ Mal abgesehen davon, dass jeder Betreiber einer Einrichtung die Verantwortung für schnellste Evakuierungsmaßnahmen hat! §§

**SICHERER → SCHNELLER → SCHONENDER**


- Sicherheitsgurte mit Schnellverschluss
- Spezielles Gleitmaterial an der Unterseite
- Treppenevakuierung möglich
- Randzonenverstärkung für mehr Stabilität
- Bergegriffe am Bezug

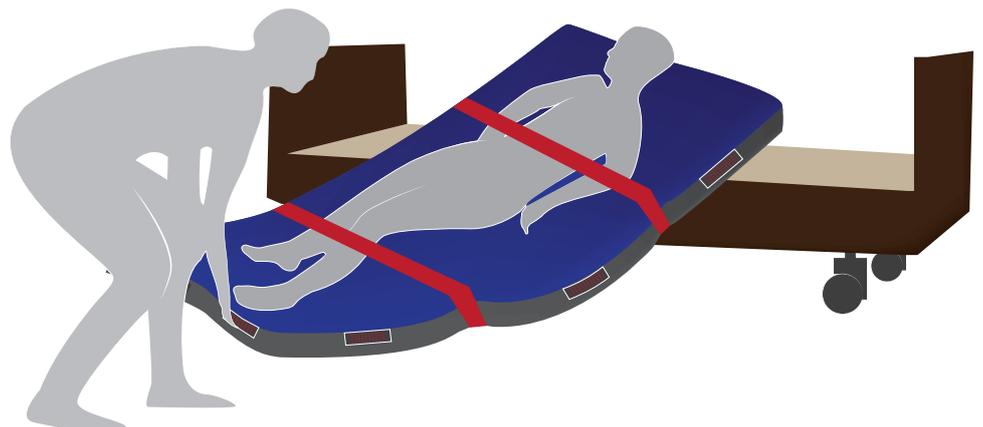

# — GREENLINE<sup>®</sup> —

RESPONSIBLE CARE

## ECOLAST<sup>®</sup> - Schaum-Technologie

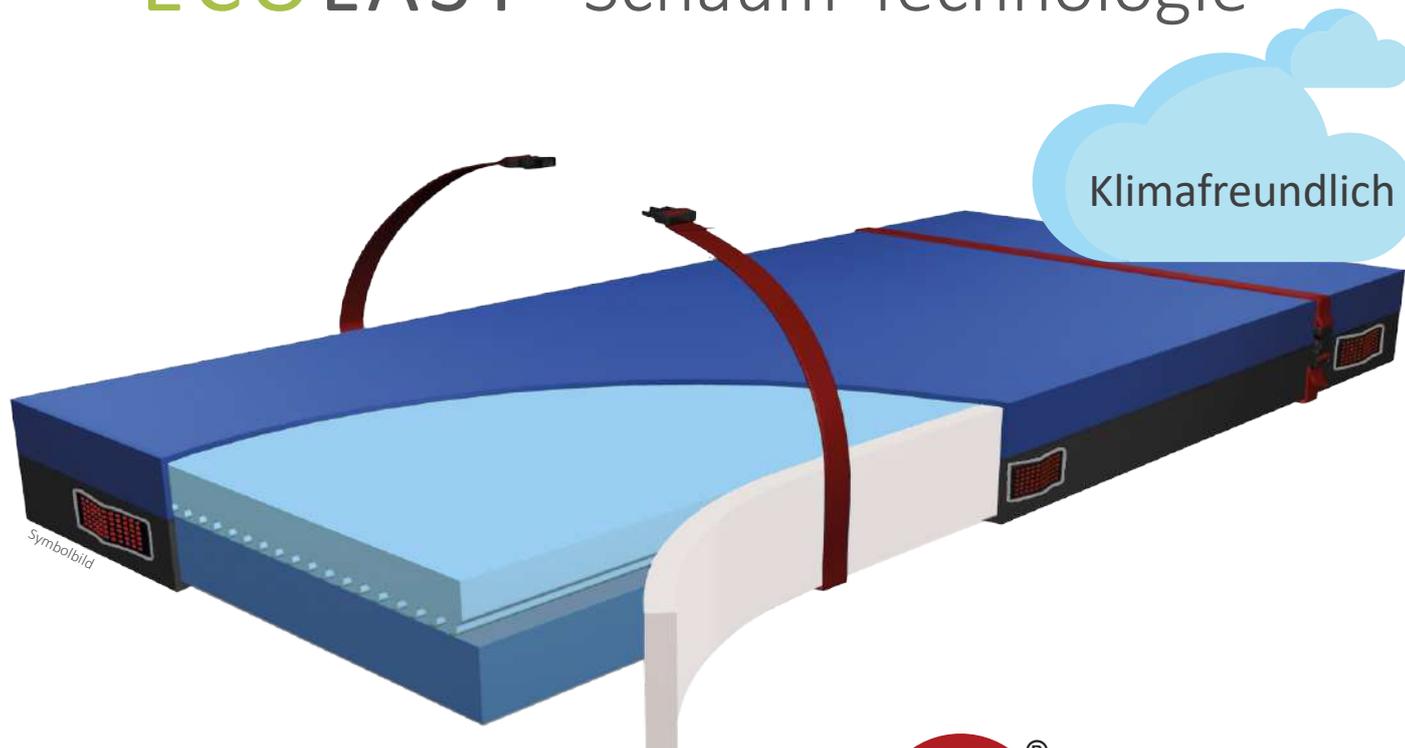

Klimafreundlich

Symbolbild

evAQ<sup>®</sup> - PRO

— GREENLINE<sup>®</sup> —  
- Your **all-in-one** solution -

Mehr Informationen über  
GREENLINE<sup>®</sup> finden Sie auf  
den Seiten 17 – 21

Überreicht durch:

**PRS**  
Pressure Relieving Solutions



Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung  
durch Entlastungslagerung


Einsetzbar bis Grad 3  
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Mittleres Risiko  
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

**evAQ® - PRO**  
— GREENLINE® —

## Dekubitustherapie-Matratze mit Evakuierungssystem

**5** JAHRE  
GARANTIE \*1

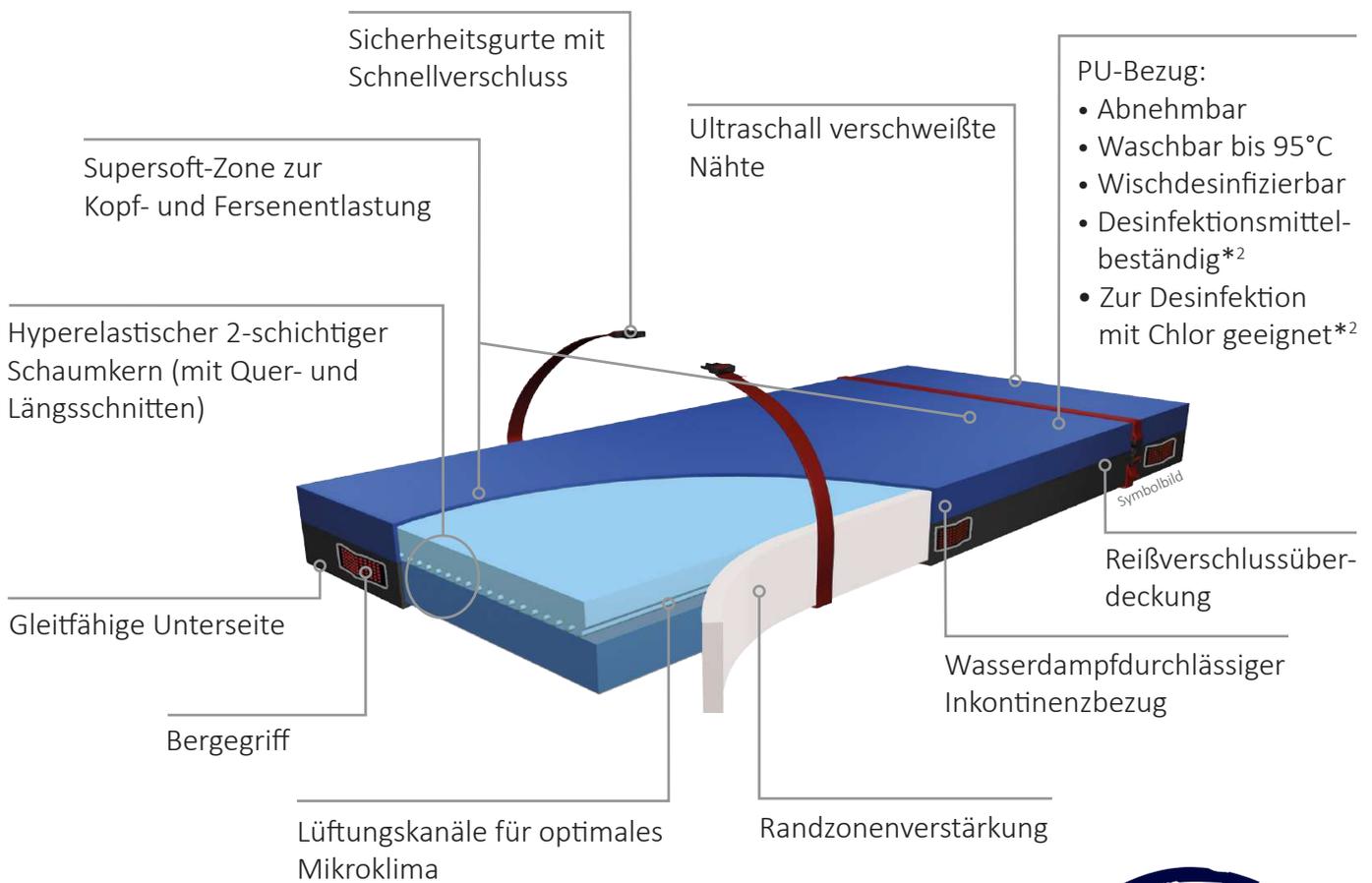

**Größe**

Höhe	14 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

**GREENLINE®**

ECOLAST®-Schaum-Technologie:

- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen




\*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie!)  
\*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

# — GREENLINE<sup>®</sup> —

RESPONSIBLE CARE

## ECOLAST<sup>®</sup> - Schaum-Technologie

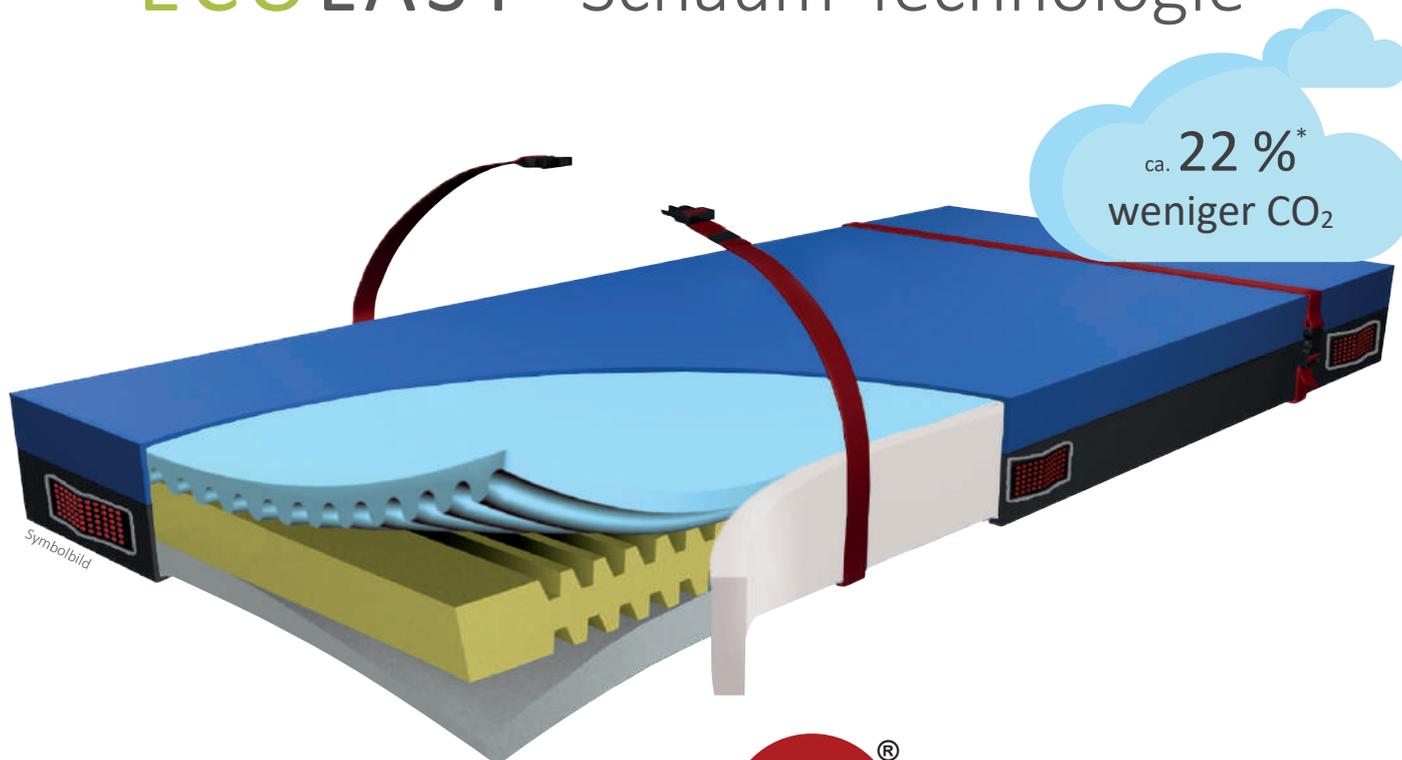

evAQ<sup>®</sup> - PRO II

— GREENLINE<sup>®</sup> —  
- Your **all-in-one** solution -

Mehr Informationen über  
GREENLINE<sup>®</sup> finden Sie auf  
den Seiten 17 – 21

Überreicht durch:

**PRS**   
Pressure Relieving Solutions



\*ca. 7,2kg weniger CO<sub>2</sub> pro Matratze (Quelle: Europur-Studie 2015)

Funke Medical GmbH • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-2669350 • Fax: +49-2865-8133 • info@funke-medical.de

Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung  
durch Entlastungslagerung


Einsetzbar bis Grad 4  
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko  
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

**evAQ® - PRO II**  
— GREENLINE® —

Dekubitustherapie-Matratze  
mit Evakuierungssystem

**7 JAHRE GARANTIE**  
\*1

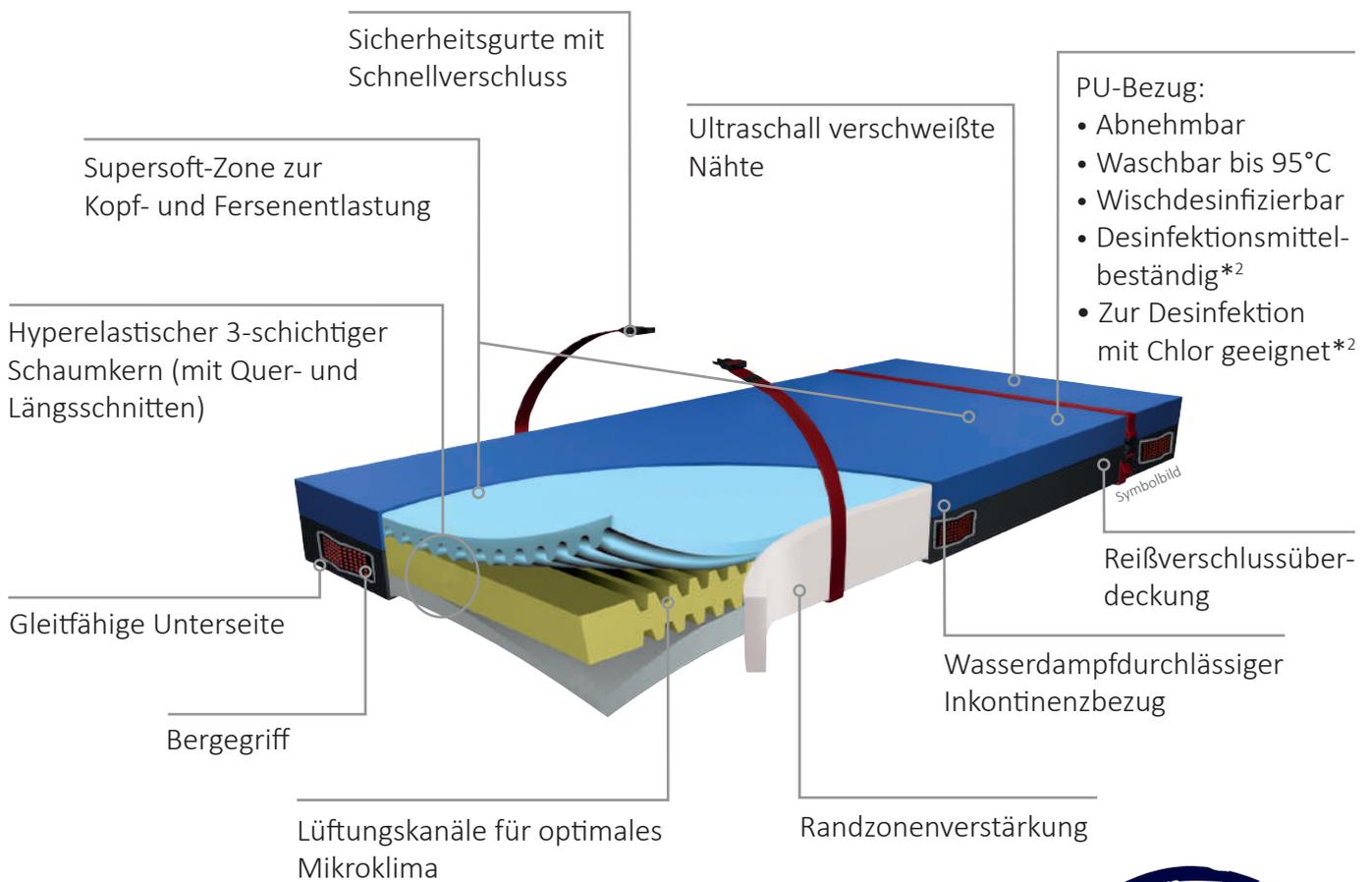

Größe	
Höhe	15 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

**GREENLINE®**

ECOLAST®-Schaum-Technologie:

- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen



\*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!  
\*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

# GREENLINE<sup>®</sup>



BARIATRIC CARE


Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.

# — GREENLINE<sup>®</sup> —

RESPONSIBLE CARE

## ECOLAST<sup>®</sup> - Schaum-Technologie

Klimafreundlich

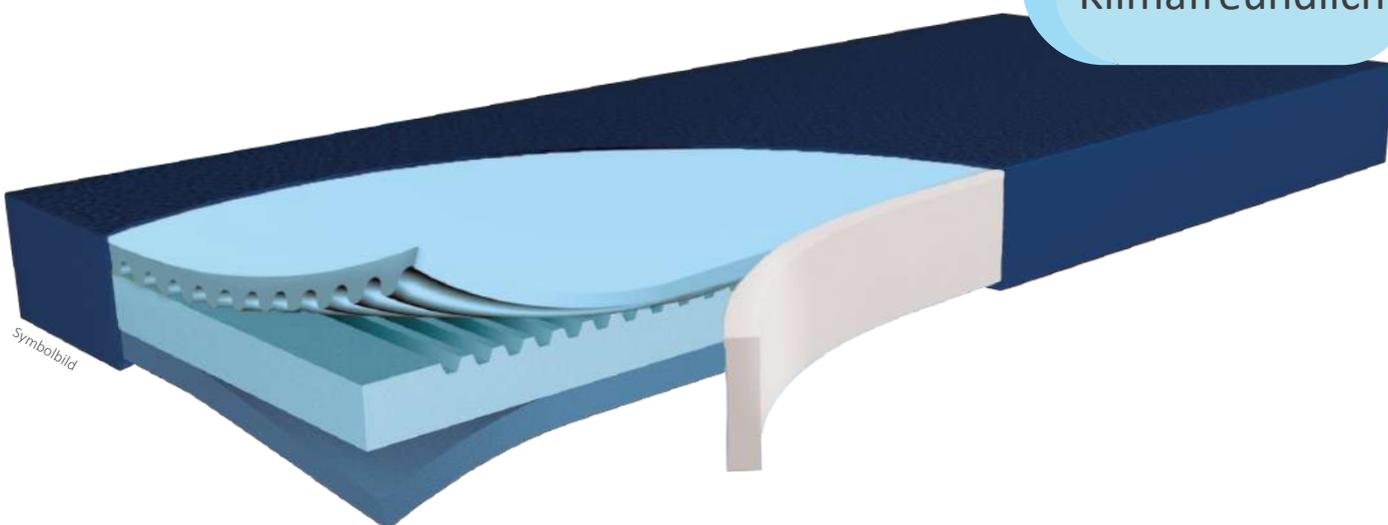

MAXX 250  
*clinic*  
— GREENLINE<sup>®</sup> —

Mehr Informationen über  
GREENLINE<sup>®</sup> finden Sie auf  
den Seiten 17 – 21

Überreicht durch:

**PRS**  
Pressure Relieving Solutions



Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung  
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 4  
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko  
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

# MAXX 250<sup>clinic</sup>

— GREENLINE® —

## Dekubitustherapie-Schwerlastmatratze

**7** JAHRE GARANTIE <sup>\*1</sup>



**Größe**

Höhe	18 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

**GREENLINE®**

ECOLAST®-Schaum-Technologie:

- **Sorgt für eine größere Langlebigkeit**
- **Weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen**



Offener atmungsaktiver ECOLAST®-Schaum



Autoklavierbar



Bezugsmaterial viren- und bakterien dicht gem. ASTM 1670 + 1671



Wasserdicht dennoch atmungsaktiv



Druckentlastung < 18 mmHg



Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte



CE-Kennzeichnung MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer entflammbar DIN EN 597 (1+2)



Max. 5000 ppm



Patientengewicht: 0 bis 250 kg


\*<sup>1</sup> Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

\*<sup>2</sup> Details siehe Gebrauchsanweisung.

# — GREENLINE<sup>®</sup> —

RESPONSIBLE CARE

## ECOLAST<sup>®</sup> - Schaum-Technologie

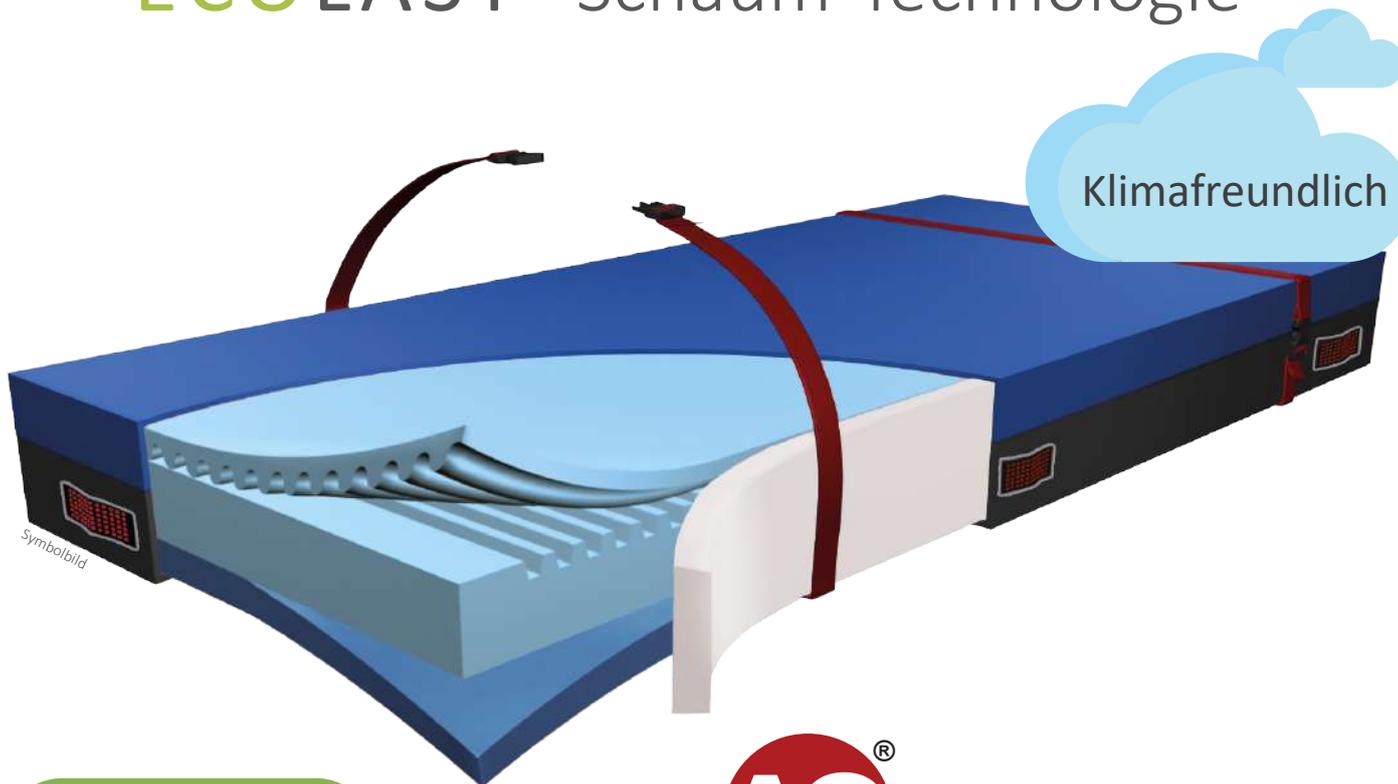

Mehr Informationen über  
GREENLINE<sup>®</sup> finden Sie auf  
den Seiten 17 – 21

Mehr Informationen über  
EVAQ<sup>®</sup> finden Sie auf den  
Seiten 29 – 32

evAQ<sup>®</sup> - PRO XL

— GREENLINE<sup>®</sup> —

- Your **all-in-one** solution -

Überreicht durch:

**PRS**  
Pressure Relieving Solutions



Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung  
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 4  
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko  
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

**evAQ® - PRO XL**  
GREENLINE®

Dekubitustherapie-Schwerlastmatratze  
mit Evakuierungssystem

**7** JAHRE  
GARANTIE \*1



Größe

Höhe	18 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE®

ECOLAST®-Schaum-Technologie:


- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen



\*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!  
\*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.




# AIRLINE<sup>©</sup>

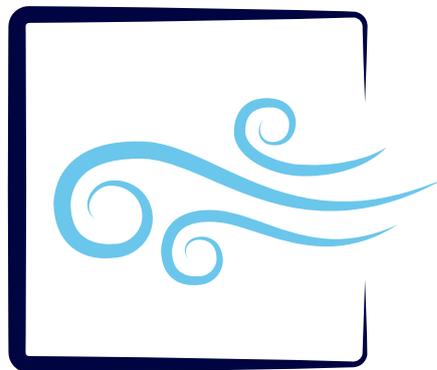

Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.



CLINIC CARE/OBJEKTEINRICHTUNG MIT SYSTEM

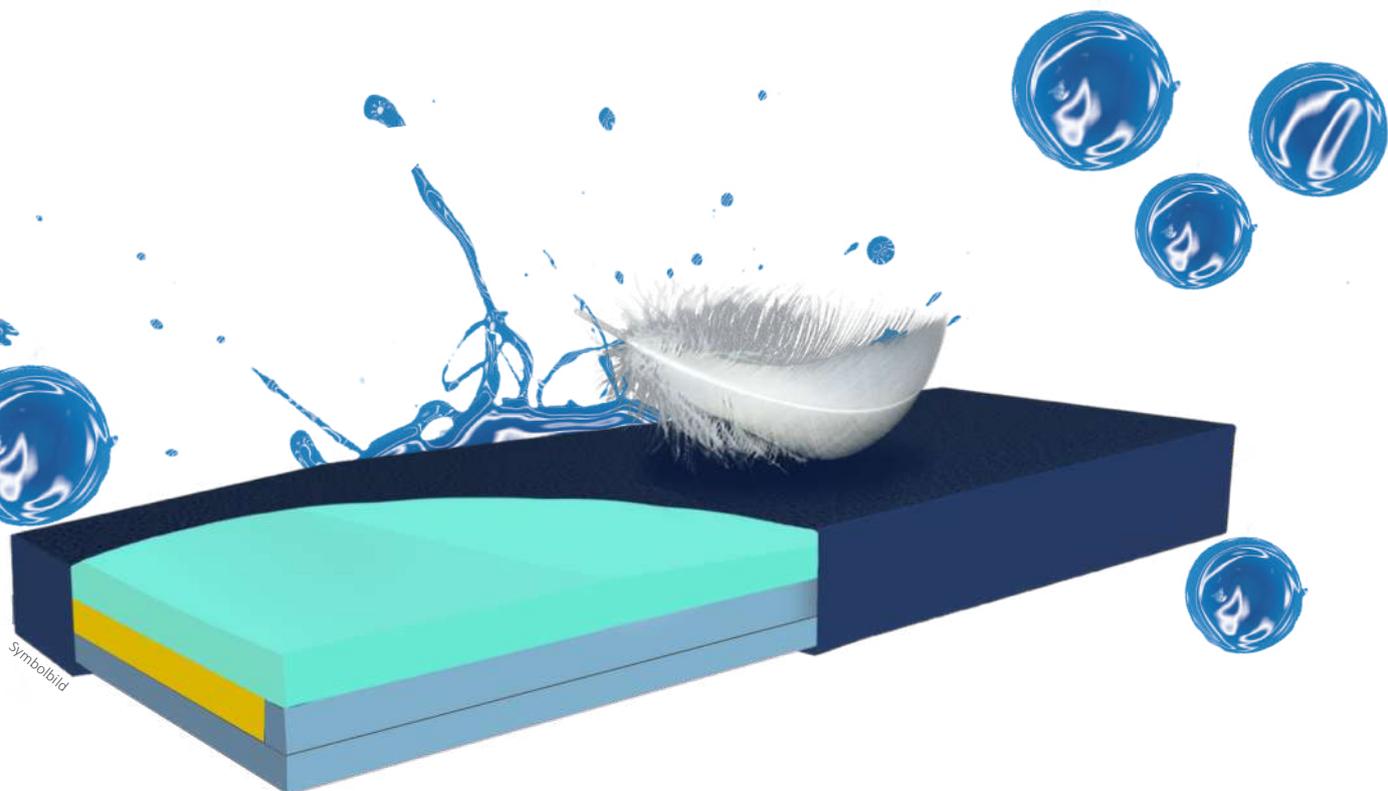

 **Hyper AIR<sup>®</sup> hybrid**  
- LUFTZELLEN-MATRATZE -

Überreicht durch:

**PRS**   
Pressure Relieving Solutions

Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung  
durch Entlastungslagerung


Einsetzbar bis Grad 4  
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko  
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

# Hyper AIR<sup>®</sup> hybrid

## Dekubitustherapie-Luftzellen-Matratze

**5** JAHRE GARANTIE\*  
\*1

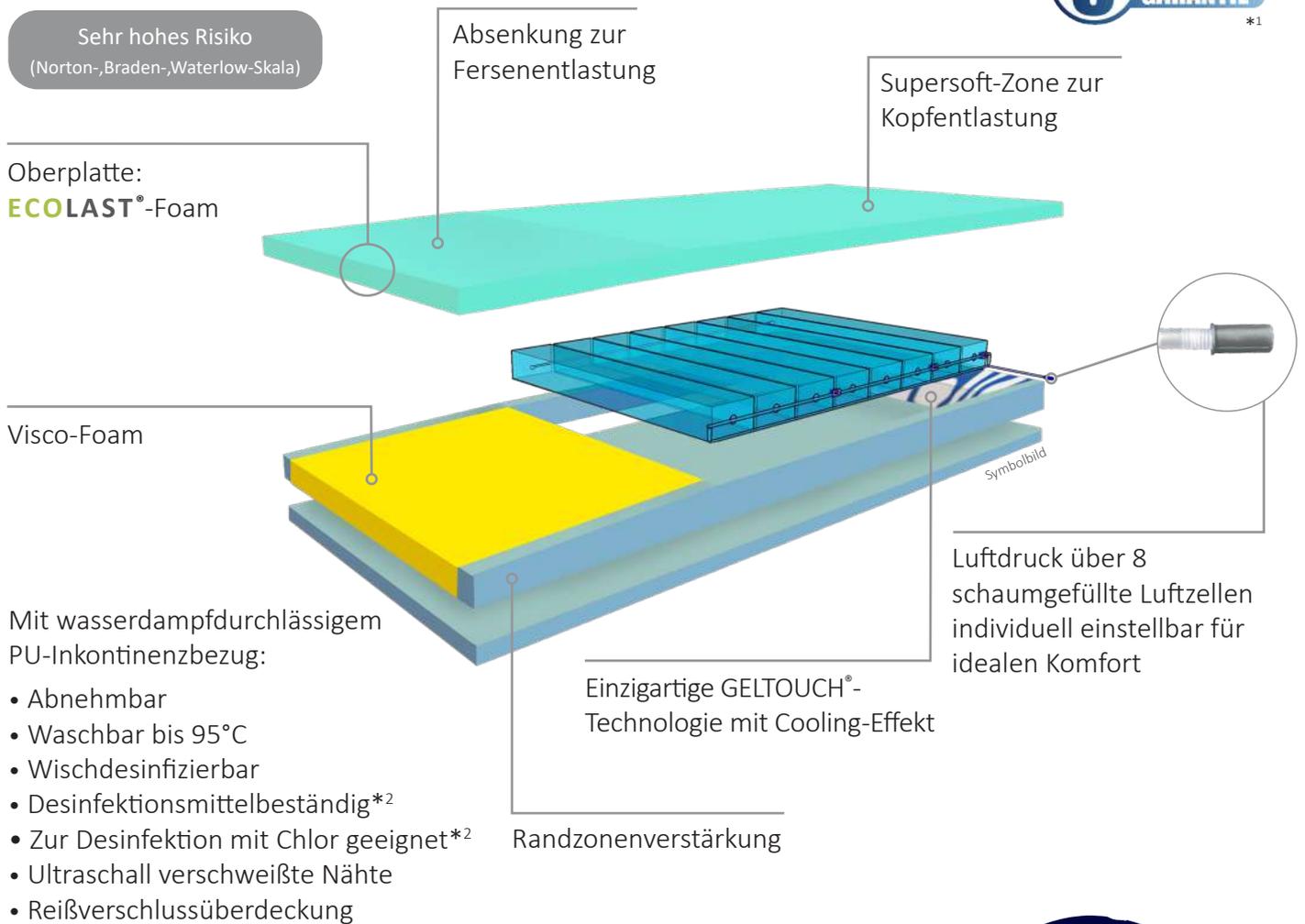

Größe	
Höhe	16 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

**GREENLINE<sup>®</sup>**

ECOLAST<sup>®</sup>-Schaum-Technologie:

- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen




Offenporiger atmungsaktiver GELTOUCH <sup>®</sup> -Foam + ECOLAST <sup>®</sup> -Foam + Visco-Foam	Autoklavierbar	Bezugsmaterial viren- und bakterienicht gem. ASTM 1670 + 1671	Wasserdicht dennoch atmungsaktiv	Druckentlastung < 18 mmHg	Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte	CE-Kennzeichnung MDR 2017/745	Wartungsfrei	Schwer entflammbar DIN EN 597 (Teil 1+2)	Kein Ausfallrisiko durch selbstaufblasende FOAM-IN-CELL-TECHNOLOGIE	Kein Strom erforderlich	Max. 5000 ppm	Patientengewicht: 0 bis 250 kg

\*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!  
\*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

# Hyper AIR<sup>®</sup> hybrid

- LUFTZELLEN-MATRATZE -

JETZT ANSEHEN  
auf YouTube!

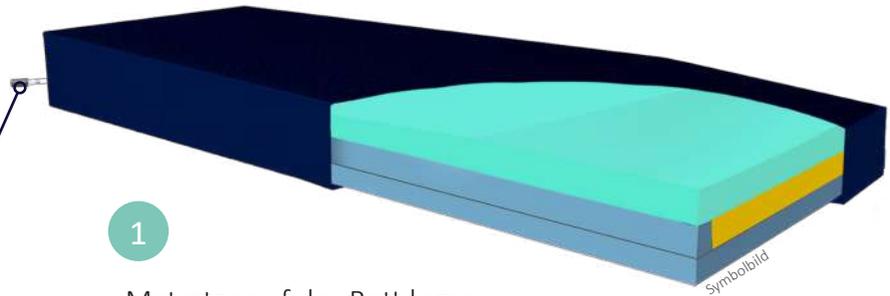

1

Matratze auf das Bett legen.  
Bitte beachten Sie den Aufdruck  
„THIS SIDE UP“.

2

Ventil durch Ziehen öffnen und  
ca. 5 Minuten warten, bis sich  
die Luftzellen selbstständig  
aufgeblasen haben.

*(Ventilkappe kann nicht herunterfallen.)*

3

Ventil durch  
Drücken schließen.

4

Legen Sie den Patienten auf die  
Matratze. Öffnen Sie vorsichtig das  
Ventil durch Ziehen der grauen Kappe,  
damit Luft entweicht und führen Sie  
gleichzeitig einen Fingertest\* durch.

*\*Führen Sie eine Hand unter das Gesäß. Der  
optimale Liegekomfort ist erreicht, wenn nur  
noch eine geringe Fingerbewegung von  
1 – 2,5 cm möglich ist.*

5

Ventil durch  
Drücken schließen.


6

Tägliche Überprüfung der richtigen  
Befüllung der Luftkammern wird  
empfohlen, ggf. ist eine Anpassung  
notwendig.

Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.




# MEMOLINE<sup>®</sup>

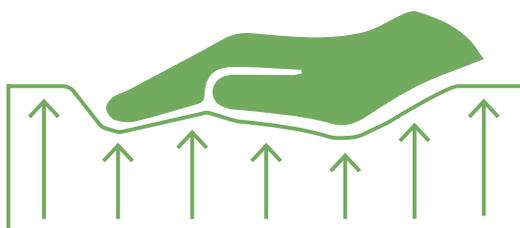

Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.

CLINIC CARE/OBJEKTEINRICHTUNG MIT SYSTEM

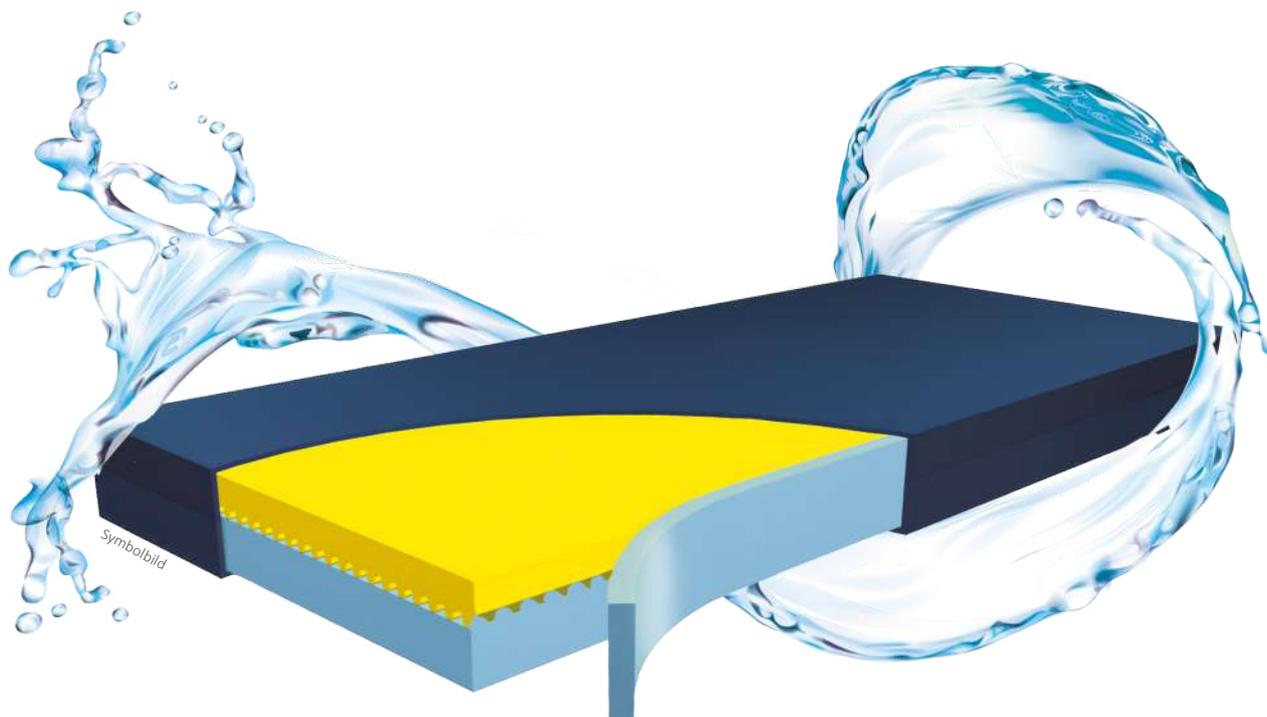

# Hyper Foam VISCO *clinic*

Überreicht durch:



Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung  
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 3  
(nach Prof. Seiler/EPUAP)

Mittleres Risiko  
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

# Hyper Foam VISCO *clinic*

Dekubitustherapie-Matratze

**5** JAHRE GARANTIE\*  
\*1



Größe

Höhe	14 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste




Offenporiger atmungsaktiver HR-Foam + Visco-Foam	Autoklavierbar	Bezugsmaterial viren- und bakterien-dicht gem. ASTM 1670 + 1671	Wasserdicht dennoch atmungsaktiv	Druckentlastung < 18 mmHg	Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte	CE-Kennzeichnung MDR 2017/745	Wartungsfrei	Schwer entflammbar DIN EN 597 (1+2)	Max. 5000 ppm	Patientengewicht: 0 bis 140 kg

\*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

\*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

## CLINIC CARE/OBJEKTEINRICHTUNG MIT SYSTEM

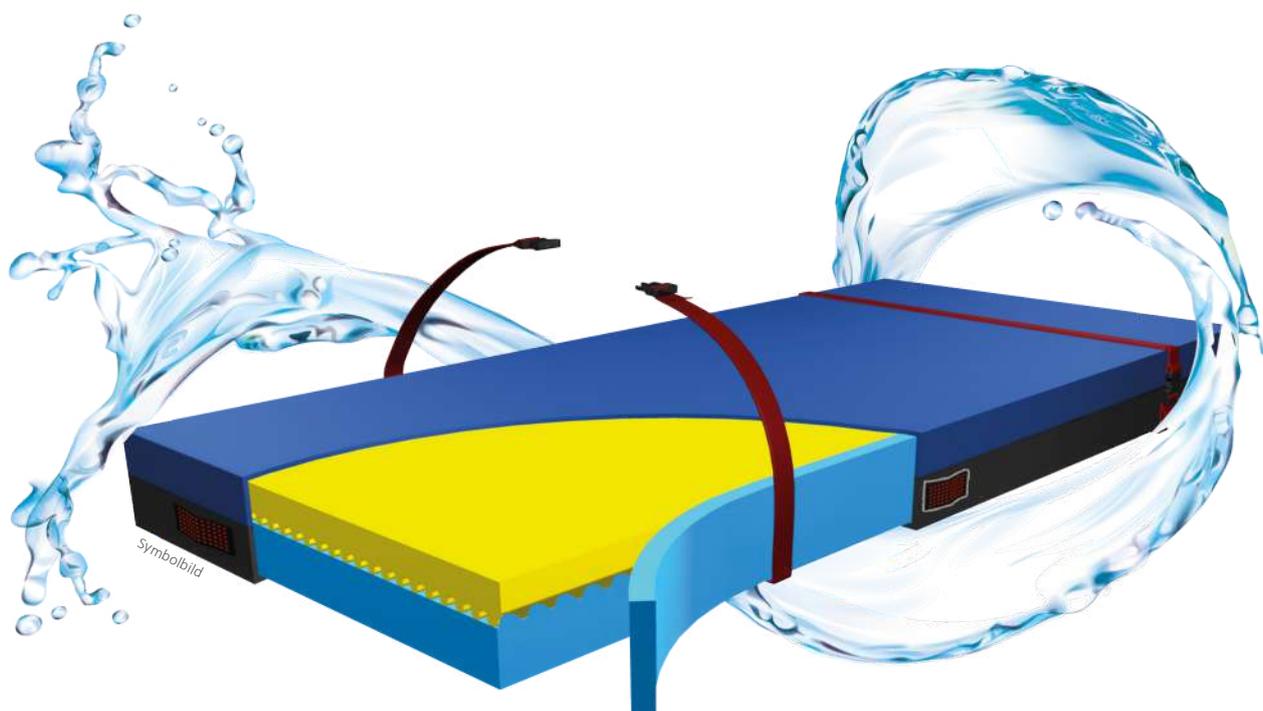

evAQ<sup>®</sup> - PRO VISCO

- Your **all-in-one** solution -

Mehr Informationen über  
EVAQ<sup>®</sup> finden Sie auf den  
Seiten 29 – 32

Überreicht durch:

**PRS**  
Pressure Relieving Solutions

Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung  
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 3  
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Mittleres Risiko  
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

# evAQ® - PRO VISCO

Dekubitustherapie-Matratze  
mit Evakuierungssystem

**5** JAHRE  
GARANTIE\*

\*1



Größe

Höhe	14 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste



\*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

\*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.



# POSITIONIERUNGSHILFEN



Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.

# Positionierungs- und Mobilitätshilfen

## POSIMED®

POSITIONIERUNGSKISSEN



Zur Dekubitusprophylaxe  
und-therapie



Geeignet zur Schmerzlinderung  
durch Entlastungslagerung



Schnelle Anpassung  
an die Körperkontur



Symbolbild

## POSIMED® HEEL PROTECT®

FERSENFREILAGERUNGSSCHUH



Zur Dekubitusprophylaxe  
und-therapie



Geeignet zur Therapie  
des diabetischen Fußes



Symbolbild

## MobiTurn®


UMLAGER- UND WENDEHILFE



Ermöglicht rücken- und  
kräfteschonendes Arbeiten



Einfache Patientendrehung

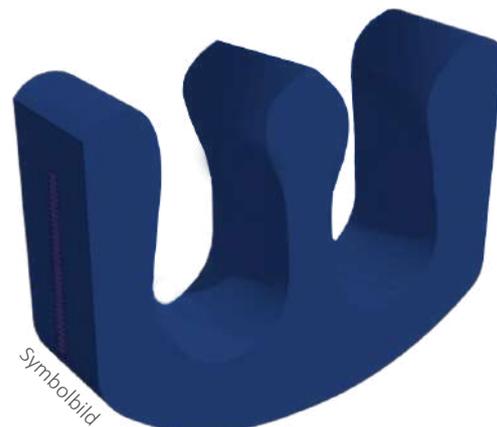

Symbolbild

Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.

# POSIMED® Produktübersicht

## Universalkissen



Für alle üblichen  
Positionierungsarten einsetzbar

Größe	Art. - Nr.
37 / 26	PO-UNIK3726
56 / 40	PO-UNIG5640

## Fersenschiene



z.B. zur Lagerung und  
Positionierung der Ferse

Größe	Art. - Nr.
39 / 21 / 8	PO-FERS3921

## Unterarmschiene



z.B. zur Lagerung und  
Positionierung des Unterarms

Größe	Art. - Nr.
39 / 21 / 8	PO-UNTE3921

## Spreizkissen



z.B. zur Lagerung von Knie,  
Knöchel und Epicondylus

Größe	Art. - Nr.
60 / 35	PO-SPRE6035

## Rollenkissen



z.B. zur Unterstützung und Positionierung  
von Knie, Nacken und anderen Gliedmaßen

Größe	Art. - Nr.
60 / 21	PO-ROLL6021

## Hüftspreizkissen



z.B. zur Lagerung und Positionierung  
der Hüfte – reduziert die Gefahr der  
Verrenkung bei Hüftprothesen

Größe	Art. - Nr.
35 / 28 / 14	PO-HUEFT3528

## Full Body Positionierungskissen



z.B. zur Unterstützung in der stabilen  
30°-Lagerung, mit integriertem Kopfkissen

Größe	Art. - Nr.
170 / 74	PO-LAGE0165
182 / 54	PO-LAGE1165

## Halbkreis



z.B. zur Lagerung und Positionierung  
des Oberkörpers

Größe	Art. - Nr.
137 / 80	PO-HALB1378


# POSIMED® Positionierungskissen

**POSIMED®-Kissen sind Positionierungskissen für die Dekubitusprophylaxe und -therapie in verschiedenen Formen und Größen zur optimalen Lagerung des Patienten.**


Durch die verschiedenen Positionierungskissen wird der Patient marginal bewegt und die Druckverteilung an den Hauptauflagepunkten ermöglicht dem Patienten ein entspanntes und druckentlastendes Liegen. Ziel ist es, die Dauer und die Intensität der Druckeinwirkung so gering wie möglich zu halten. Unsere Positionierungskissen basieren auf einer druckentlastenden und positionierfähigen Kugelchenfüllung!

## Positionierungsbeispiele


30°-Seitenlagerung

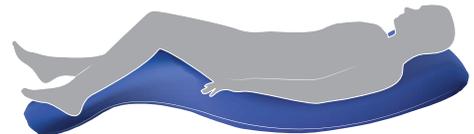


Fersenhochlagerung

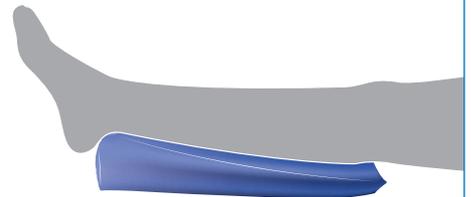

Halb sitzend

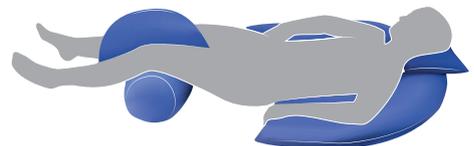

135°-Lagerung

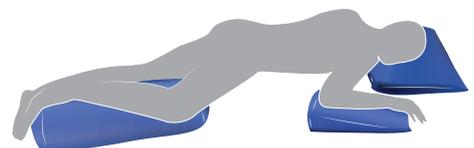

## DEKUBITUSTHERAPIE UND PATIENTENPOSITIONIERUNG MIT SYSTEM



Symbolbild

# POSIMED®

- POSITIONIERUNGSKISSEN -

*universalkissen*

Überreicht durch:

Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung  
durch Entlastungslagerung

Zur Dekubitusprophylaxe  
und -therapie

Bezug einfach zu desinfizieren

# POSIMED®

- POSITIONIERUNGSKISSEN -  
*universalkissen*

**5** JAHRE  
GARANTIE \*1

**Kissen:**

- Waschbar bis 60°C
- Autoklavierbar
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig\*<sup>2</sup>
- Zur Desinfektion mit Chlor geeignet\*<sup>2</sup>

Biokompatibel

Wasserdampfdurchlässiger  
Inkontinenzbezug gewährleistet  
ein hervorragendes Mikroklima



**Kügelchenfüllung sorgt für:**

- Schnelle Anpassung an die Körperkontur
- Sichere Patientenlagerung
- Physiologische Wärmeerhaltung

Zur Unterstützung der Lagerung von  
Extremitäten

Art. - Name

Größe

Art. - Nr.

Länge x Breite

Universalkissen klein

37 x 26

PO-UNIK3726

Universalkissen groß

56 x 40

PO-UNIG5640



Autoklavierbar




Bezugsmaterial viren- und bakterien-dicht gem. ASTM 1670 + 1671



Wasserdicht dennoch atmungsaktiv



Druckentlastung durch Entlastungslagerung

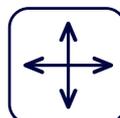

Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte



CE- Kennzeichnung MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer entflammbar DIN EN 597 (1+2)



Leicht zu reinigen durch Wischdesinfektion



Max. 5000 ppm

\*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften (Pro-Rata-Garantie)!

\*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

Statische Positionierungskissen für die Extremitäten helfen bei der Dekubitusprophylaxe und/oder -therapie. Sie dienen der Unterstützung der Freilagerung und der Lageveränderung sowie der Stabilisierung von Lagepositionen von zu pflegenden Personen insbesondere im Bett. Die Positionierungskissen können die manuellen Positionswechsel nicht ersetzen, aber ggf. die Intervalle der Positionswechsel verlängern und die Positionierung ermöglichen. Die Intervalldauer ist vom individuellen Gesundheitszustand der zu pflegenden Person abhängig. Um den sicheren Einsatz des Positionierungskissens zu gewährleisten, muss die Pflegeperson über das entsprechende fachliche Know-how verfügen oder in die Anwendung des Produktes von einer Pflegefachkraft eingewiesen worden sein.

**Indikationen:**

- **Dekubitus-therapie und -prophylaxe:** Durch die schonende Positionierung können gefährdete Körperregionen wie Arme, Beine und/oder Fersen temporär frei oder weich gelagert werden.
- **Mobilitätseinschränkungen und/oder Schädigung der Körperwahrnehmung:** Das Positionierungskissen unterstützt die Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften und die Sicherung der Lageposition bei zu pflegenden Personen, die einen eigenständigen Positionswechsel nicht mehr durchführen können.
- **Schmerzen:** Geeignet zur Schmerzlinderung durch Entlastungslagerung

## Positionierungsbeispiele

### Allgemeine Vorbereitung




A.

Überprüfen Sie zuerst das Universalkissen auf Sauberkeit und eventuelle Schäden.



B.

Bitte achten Sie während des Lagerungsvorganges auf eine gleichmäßige Verteilung der Kugelfüllung im Kissen.

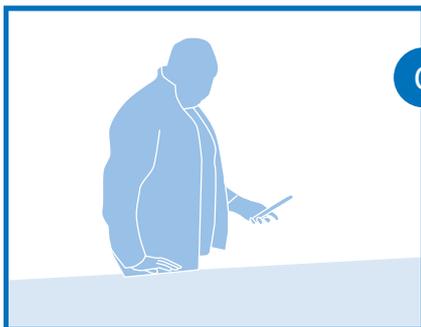


C.

Das Pflegebett sollte auf die Arbeitshöhe der Pflegeperson eingestellt werden. Hierbei gilt die Höhe des Hüftkopfs der Pflegeperson als Orientierungspunkt.

Falls die zu pflegende Person ansprechbar ist, sollte sie über jeden Schritt informiert werden. Stellen Sie dabei Augenkontakt her und sofern von der zu pflegenden Person akzeptiert, legen Sie die Hand auf die Schulter.


### Positionierung des Arms

Das Universalkissen dient zur druckentlastenden Positionierung von gefährdeten Körperregionen wie z.B. der Arme.

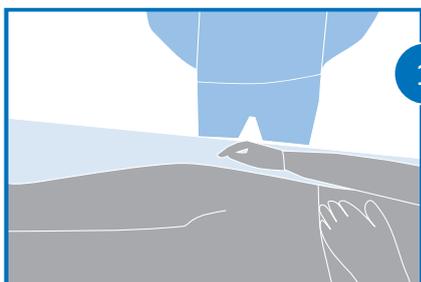

1.

Die zu pflegende Person sollte sich in der Rückenlage im Bett befinden. Die Pflegeperson befindet sich am zum entlastenden Arm.

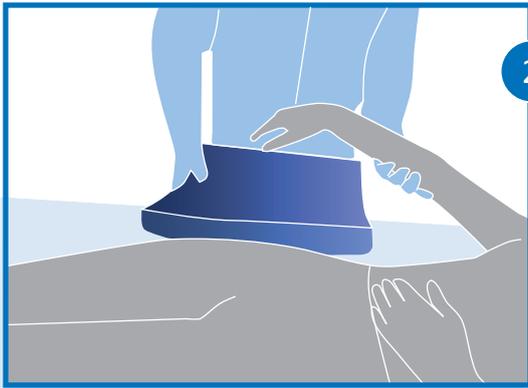

2.

Die Pflegeperson sollte darauf achten, den Arm nicht direkt an den Gelenken anzufassen. Die Pflegeperson fasst mit der einen Hand an den Unterarm der zu pflegenden Person und mit der anderen Hand schiebt sie das Universalkissen unter den Unterarm.



3.

Der Ellbogen der zu pflegenden Person sollte entweder freiliegen oder ganz auf dem Kissen aufliegen. Der Arm sollte sich nicht auf der Kante befinden.

Vergewissern Sie sich, falls möglich, ob die zu pflegende Person mit der Position einverstanden ist und überprüfen Sie den Arm nochmal auf eine gute Positionierung.


**Um die zu pflegende Person wieder in die Ausgangsposition zu bringen, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:**

Die Pflegeperson hebt den Arm der zu pflegenden Person an und entfernt das Universalkissen. Vergewissern Sie sich erneut, ob die zu pflegende Person bequem liegt.

## Positionierung des Beins

Das Universalkissen dient zur druckentlastenden Positionierung von gefährdeten Körperregionen wie Beine und Fersen.

Bereiten Sie, wie im Bild A-C beschrieben, den Lagerungsvorgang vor.

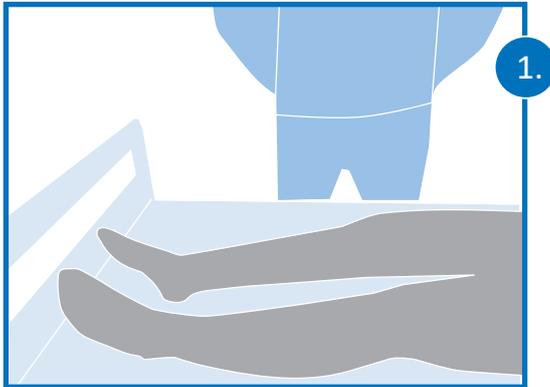

1.

Die zu pflegende Person sollte in der Rückenlage im Bett befinden. Die Pflegeperson befindet sich am zum entlastenden Bein.



2.

Die Pflegeperson sollte darauf achten, das Bein nicht direkt an den Gelenken anzufassen.

Die Pflegeperson fasst mit der einen Hand an den Unterschenkel der zu pflegenden Person und mit der anderen Hand schiebt sie das Universalkissen unter den Unterschenkel.



3.

Die Ferse der zu pflegenden Person sollte freiliegen. Vergewissern sie sich, falls möglich, ob die zu pflegende Person mit der Position einverstanden ist und überprüfen Sie das Bein nochmal auf eine gute Positionierung.

**Um die zu pflegende Person wieder in die Ausgangsposition zu bringen, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:** Die Pflegeperson hebt den Bein der zu pflegenden Person an und entfernt das Universalkissen. Vergewissern Sie sich erneut, ob die zu pflegende Person bequem liegt.

Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.

## DEKUBITUSTHERAPIE UND PATIENTENPOSITIONIERUNG MIT SYSTEM



# POSIMED®

- POSITIONIERUNGSKISSEN - *Rollenkissen*

Überreicht durch:

Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung  
durch Entlastungslagerung

Zur Dekubitusprophylaxe  
und -therapie

Bezug einfach zu desinfizieren

# POSIMED®

- POSITIONIERUNGSKISSEN - Rollenkissen

**5** JAHRE  
GARANTIE \*1

Zur druckentlastenden Lagerung von gefährdeten Körperregionen wie Kopf, Nacken- und Schulterbereich, Becken, Knie und Beine

Kissen:

- Waschbar bis 60°C
- Autoklavierbar
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig\*<sup>2</sup>
- Zur Desinfektion mit Chlor geeignet\*<sup>2</sup>

Biokompatibel



Kügelchenfüllung sorgt für:


- Schnelle Anpassung an die Körperkontur
- Sichere Patientenlagerung
- Physiologische Wärmeerhaltung

Wasserdampfdurchlässiger Inkontinenzbezug gewährleistet ein hervorragendes Mikroklima

Art. - Name	Größe Länge x Breite	Art. - Nr.
Rollenkissen	60 x 21	PO-ROLL6021



Autoklavierbar

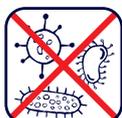

Bezugsmaterial viren- und bakterien dicht gem. ASTM 1670 + 1671



Wasserdicht dennoch atmungsaktiv



Druckentlastung durch Entlastungslagerung



Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte



CE-Kennzeichnung MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer entflammbar DIN EN 597 (1+2)



Leicht zu reinigen durch Wischdesinfektion



Max. 5000 ppm

\*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften (Pro-Rata-Garantie)!

\*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

Statische Positionierungskissen für den Teilkörper helfen bei der Dekubitusprophylaxe und/oder -therapie. Sie dienen der Unterstützung der Entlastungslagerung und der Lageveränderung sowie der Stabilisierung von Lagepositionen von zu pflegenden Personen insbesondere im Bett. Die Positionierungskissen können die manuellen Positionswechsel nicht ersetzen, aber ggf. die Intervalle der Positionswechsel verlängern und die Positionierung ermöglichen. Die Intervalldauer ist vom individuellen Gesundheitszustand der zu pflegenden Person abhängig. Um den sicheren Einsatz des Positionierungskissens zu gewährleisten, muss die Pflegeperson über das entsprechende fachliche Know-how verfügen oder in die Anwendung des Produktes von einer Pflegefachkraft eingewiesen worden sein.

**Indikationen:**

- **Dekubitustherapie und -prophylaxe:** Durch die schonende Positionierung können gefährdete Körperregionen wie Kopf, Nacken- und Schulterbereich, Becken, Knie und Beine temporär entlastet werden.
- **Mobilitätseinschränkungen und/oder Schädigung der Körperwahrnehmung:** Das Positionierungskissen unterstützt die Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften und die Sicherung der Lageposition bei zu pflegenden Personen, die einen eigenständigen Positionswechsel nicht mehr durchführen können.
- **Schmerzen:** Geeignet zur Schmerzlinderung durch Entlastungslagerung

## Positionierungsbeispiele

### Allgemeine Vorbereitung




A

Überprüfen Sie zuerst das Rollenkissen auf Sauberkeit und eventuelle Schäden.



B

Bitte achten Sie während des Lagerungsvorganges auf eine gleichmäßige Verteilung der Kügelchenfüllung im Kissen.

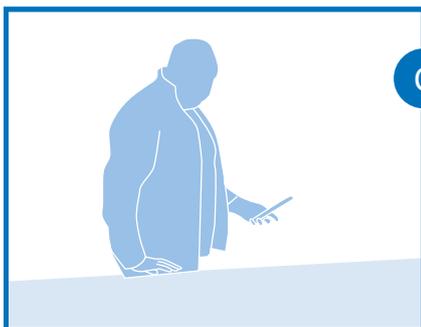


C

Das Pflegebett sollte auf die Arbeitshöhe der Pflegeperson eingestellt werden. Hierbei gilt die Höhe des Hüftkopfs der Pflegeperson als Orientierungspunkt.

Falls die zu pflegende Person ansprechbar ist, sollte sie über jeden Schritt informiert werden. Stellen Sie dabei Augenkontakt her und sofern von der zu pflegenden Person akzeptiert, legen Sie die Hand auf die Schulter.

### Hochlagerung des Becken, Knie- und Beinbereiches

Das Rollenkissen dient zur druckentlastenden Positionierung von gefährdeten Körperregionen wie Kopf, Nacken- und Schulterbereich, Becken, Knie und Beine.

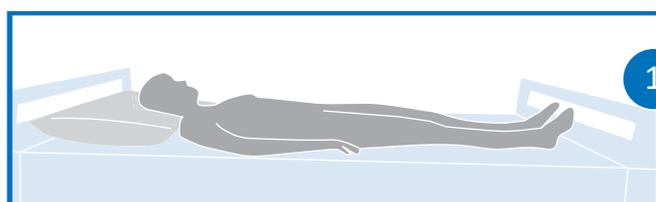


1.

Bei dieser Positionierung dient das Rollenkissen der leichten Beugung des Kniebereichs. Dadurch wird die Spannung der Bauchdecke reduziert und das Atmen fällt leichter. Gleichzeitig kommt es zu einer moderaten Druckentlastung im Kreuz-/Steißbeinbereich. Der Auflagedruck in diesem Bereich wird verringert, da ein Hohlkreuz aufgehoben wird und der ganze Rücken als Auflagefläche dient.



Die Pflegeperson fasst mit einem Arm unter die Unterschenkel der zu pflegenden Person, um die Beine vorsichtig anzuheben. Nun kann die Pflegeperson mit dem anderen Arm das Rollenkissen unter den unteren Teil der Oberschenkel platzieren.

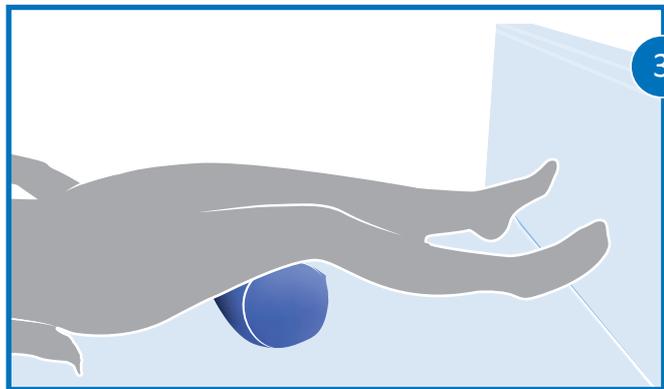

Die Pflegeperson sollte darauf achten, dass sich das Rollenkissen nicht direkt in der Kniekehle der zu pflegenden Person befindet, um die Nerven und Blutgefäße zu schützen.

Vergewissern Sie sich, falls möglich, ob die zu pflegende Person mit der Position einverstanden ist und überprüfen Sie die Beine nochmals auf eine gute Positionierung.


**Um die zu pflegende Person wieder in die Ausgangsposition zu bringen, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:**

Die Pflegeperson hebt die Beine der zu pflegenden Person an und entfernt das Rollenkissen. Vergewissern Sie sich erneut, ob die zu pflegende Person bequem liegt.


## Lagerung des Kopf-, Nacken- und Schulterbereiches

Das Rollenkissen dient zur druckentlastenden Positionierung von gefährdeten Körperregionen wie z.B. des Kopfes.

Bereiten Sie, wie im Bild A-C beschrieben, den Lagerungsvorgang vor.

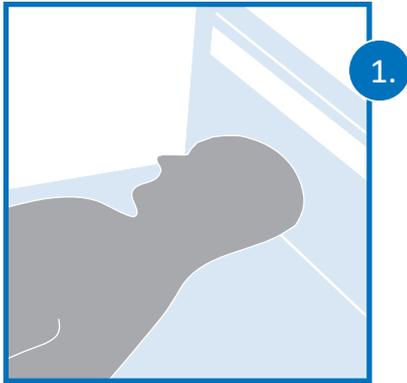

Die zu pflegende Person befindet sich dazu in der Rückenlage mittig im Bett.

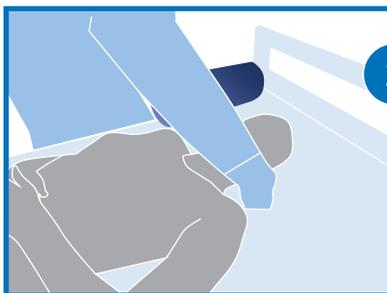

Die Pflegeperson fasst mit der einen Hand um den Halswirbelsäulenbereich der zu pflegenden Person.



Mit der anderen Hand schiebt die Pflegeperson das Rollenkissen in den Nackenbereich.



Die Pflegeperson sollte darauf achten, dass das Rollenkissen nicht direkt unter den Hinterkopf der zu pflegenden Person liegt. Vergewissern Sie sich, falls möglich, ob die zu pflegenden Person mit der Position einverstanden ist und überprüfen Sie den Kopf nochmals auf eine gute Positionierung.

**Um die zu pflegende Person wieder in die Ausgangsposition zu bringen, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:**

Die Pflegeperson hebt den Halswirbelsäulenbereich der zu pflegenden Person an und entfernt das Rollenkissen.

Vergewissern Sie sich erneut, ob die zu pflegende Person bequem liegt.

Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.

## DEKUBITUSTHERAPIE UND PATIENTENPOSITIONIERUNG MIT SYSTEM



Symbolbild

# POSIMED®

- POSITIONIERUNGSKISSEN - *Full Body  
Positionierungskissen*

Überreicht durch:

Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung  
durch Entlastungslagerung

Zur Dekubitusprophylaxe  
und -therapie

Bezug einfach zu desinfizieren

# POSIMED®

- POSITIONIERUNGSKISSEN -

Full Body  
Positionierungskissen

**5** JAHRE  
GARANTIE \*1

Kissen:

- Waschbar bis 60°C
- Autoklavierbar
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig\*<sup>2</sup>
- Zur Desinfektion mit Chlor geeignet\*<sup>2</sup>

Biokompatibel

Wasserdampfdurchlässiger  
Inkontinenzbezug gewährleistet  
ein hervorragendes Mikroklima

Zur Unterstützung in der  
30°- Seiten- und 135°- Seiten-/Bauchlagerung

Kügelchenfüllung sorgt für:

- Schnelle Anpassung an die Körperkontur
- Sichere Patientenstabilisierung
- Physiologische Wärmeerhaltung

Art. - Name

Größe

Art. - Nr.


Länge x Breite

Full Body Positionierungskissen Size M 170 / 74 PO-LAGE0165

Full Body Positionierungskissen Size L 182 / 54 PO-LAGE1165



Autoklavierbar

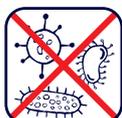

Bezugsmaterial viren- und bakterienresistent gem. ASTM 1670 + 1671



Wasserdicht dennoch atmungsaktiv



Druckentlastung durch Entlastungslagerung



Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte



CE-Kennzeichnung MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer entflammbar DIN EN 597 (1+2)



Leicht zu reinigen durch Wischdesinfektion



Max. 5000 ppm

\*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften (Pro-Rata-Garantie)!

\*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

Statische Positionierungskissen für die Extremitäten helfen bei der Dekubitusprophylaxe und/oder -therapie. Sie dienen der Unterstützung der Freilagerung und der Lageveränderung sowie der Stabilisierung von Lagepositionen von zu pflegenden Personen insbesondere im Bett. Die Positionierungskissen können die manuellen Positionswechsel nicht ersetzen, aber ggf. die Intervalle der Positionswechsel verlängern und die Positionierung ermöglichen. Die Intervalldauer ist vom individuellen Gesundheitszustand der zu pflegenden Person abhängig. Um den sicheren Einsatz des Positionierungskissens zu gewährleisten, muss die Pflegeperson über das entsprechende fachliche Know-how verfügen oder in die Anwendung des Produktes von einer Pflegefachkraft eingewiesen worden sein.

## Indikationen:

- **Dekubitustherapie und -prophylaxe:** Durch schonende seitliche Positionierung können gefährdete Körperregionen wie Hinterkopf, Schulterblatt, Beckenkamm und vor allem Kreuz- und Steißbein temporär entlastet werden.
- **Mobilitätseinschränkungen und/oder Schädigung der Körperwahrnehmung:** Das Positionierungskissen unterstützt die Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften und die Sicherung der Lageposition bei zu pflegenden Personen, die einen eigenständigen Positionswechsel nicht mehr durchführen können.
- **Schmerzen:** Geeignet zur Schmerzlinderung durch Entlastungslagerung

## Positionierungsbeispiele

### Allgemeine Vorbereitung



- A.** Überprüfen Sie zuerst das Full Body Positionierungskissen auf Sauberkeit und eventuelle Schäden.



- B.** Bitte achten Sie während des Lagerungsvorganges auf eine gleichmäßige Verteilung der Kugelfüllung im Kissen.



- C.** Das Pflegebett sollte auf die Arbeitshöhe der Pflegeperson eingestellt werden. Hierbei gilt die Höhe des Hüftkopfs der Pflegeperson als Orientierungspunkt.  
Falls die zu pflegende Person ansprechbar ist, sollte sie über jeden Schritt informiert werden. Stellen Sie dabei Augenkontakt her und sofern von der zu pflegenden Person akzeptiert, legen Sie die Hand auf die Schulter.

### Vorbereitung der Positionierung

Die zu pflegende Person sollte in die Ausgangslage gebracht werden, sodass die eigentliche Positionierung durchgeführt werden kann.



- I.** Liegt die zu pflegende Person mittig oder zu weit an der gegenüberliegenden Seite, muss Sie in die Nähe der Bettkante, an der die Pflegeperson steht, gelegt werden.  
Um die zu pflegende Person an der Bettkante zu platzieren, hebt die Pflegeperson mit der rechten Hand die linke Schulter der zu pflegenden Person an und schiebt die linke Hand unter das Schulterblatt, bis zum Beginn der Wirbelsäule.



II.


Dann greift die rechte Hand der Pflegeperson an die linke Schulter der zu pflegenden Person, dreht diese leicht, sodass sie auf dem linken Unterarm der Pflegekraft zum Liegen kommt.

Beim Herausziehen des linken Unterarms dreht sich die zu pflegende Person auf den Rücken und kommt der Pflegeperson entgegen. Die zu pflegende Person sollte vor der Bettkante zum Liegen kommen.



III.

Dieser Vorgang wird mit der Hüfte nach dem gleichen Schema wiederholt. Wird die andere Seite positioniert ist dieses Spiegelverkehrt zu handhaben.

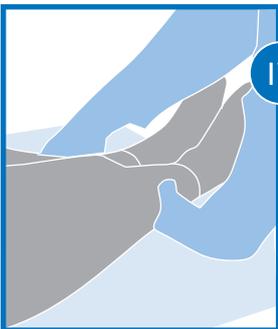

IV.

Dann werden die Beine unterhalb der Knie leicht angehoben und so abgelegt, dass die zu pflegende Person wieder gerade liegt.

## Die 30°-Seitenlagerung

Das Full Body Positionierungskissen dient in der 30°-Seitenlagerung zur druckentlastenden Positionierung von gefährdeten Körperregionen wie Hinterkopf, Schulterblatt, Beckenkamm und vor allem Kreuz- und Steißbeinbereich.

**Falls sich die zu pflegende Person falsch im Bett befindet, bitte folgen Sie Bild I.-IV.**



1.

Die zu pflegende Person sollte sich in Rückenlage in Nähe der Bettkante befinden, an der die Pflegeperson steht. Die Pflegeperson steht an der zu entlastenden Seite der zu pflegenden Person. Das Full Body Positionierungskissen wird an der Bettkante neben der zu pflegenden Person, zwischen Pflegekraft und Patient platziert.



Das vor der Pflegeperson liegende Full Body Positionierungskissen wird unter die Körperhälfte der zu pflegenden Person geschoben. Dazu hebt die Pflegeperson die linke Schulter der zu pflegenden Person an. So wird nun auch mit der Hüfte verfahren.



Die Beine werden auch unterstützt. Mit vorsichtigen, bedachten Bewegungen wird das obenliegende Bein auf dem Full Body Positionierungskissen zum Liegen gebracht. Bitte beachten Sie, dass nicht an die Gelenke gefasst wird. Das obenliegende Bein kommt auf dem Kissen zum Liegen.



Vergewissern Sie sich, falls möglich, ob die zu pflegende Person mit der Position einverstanden ist und überprüfen Sie Kopf und Füße nochmal auf eine gute Positionierung.

**Um die zu pflegende Person wieder in die Ausgangsposition zu bringen, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:**


Die Pflegeperson greift mit der rechten Hand an das Schulterblatt und hebt die zu pflegende Person vorsichtig an. Mit der linken Hand kann nun der obere Teil des Kissens herausgenommen werden. So wird auch mit dem Beckenbereich verfahren. Nun kann das Full Body Positionierungskissen entfernt werden. Anschließend sollte die zu pflegende Person wieder mittig im Bett positioniert werden. Die Vorgehensweise ist wie in Schritt I.-IV. Vergewissern Sie sich erneut, ob die zu pflegende Person bequem liegt.

## Die 135°-Seiten- /Bauchlagerung

Das Full Body Positionierungskissen dient in der 135°-Seiten-/Bauchlagerung zur druckentlastenden Positionierung von gefährdeten Körperregionen wie Hinterkopf, Schulterblatt, Kreuz- und Steißbein.

**Bereiten Sie, wie im Bild A-C beschrieben, den Lagerungsvorgang vor.**

**Falls sich die zu pflegende Person in der falschen Position im Bett befindet, folgen Sie der Beschreibung I.-IV.**

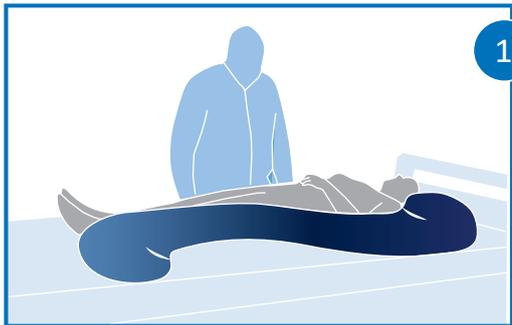


Die Pflegeperson steht an der zu entlastenden Seite der zu pflegenden Person. Das Full Body Positionierungskissen wird an der gegenüberliegenden Bettkante platziert.



Zur Sicherung der zu pflegenden Person sollte das vorhandene Bettgitter an der gegenüberliegenden Seite hochgestellt werden. Die Pflegeperson hebt mit der rechten Hand die Hüfte der zu pflegenden Person an und platziert den Arm der zu pflegenden Person mit der Handinnenfläche nach oben liegend, unter den Oberkörper.




Das außenliegende Bein der zu pflegenden Person wird angewinkelt aufgestellt. Die Pflegeperson sollte darauf achten nicht fest zuzugreifen, sondern mit der rechten Hand das Bein nur zu führen.

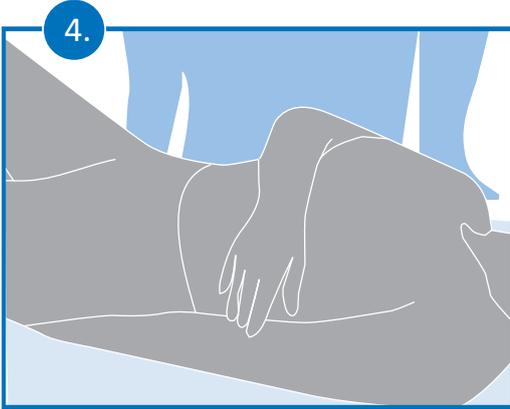

Nun platziert die Pflegeperson eine Hand unter der Schulter der zu pflegenden Person und eine Hand unter dem Kreuz- und Steißbeinbereich. Jetzt kann die zu pflegende Person zum Full Body Positionierungskissen hin gedreht werden.

Bei größerem Kraftaufwand kann das Knie der zu pflegenden Person als zusätzlicher Hebel genutzt werden.

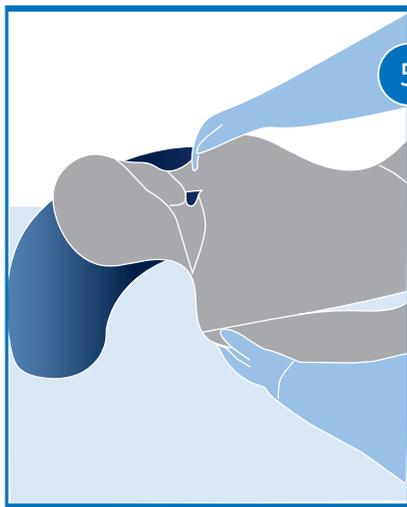

Befindet sich die zu pflegende Person in Bauchlage, sollte die Pflegeperson die Position der untenliegenden Schulter nochmals überprüfen und ggf. die Schulter vorsichtig nach hinten rausziehen.



Vergewissern Sie sich, falls möglich, ob die zu pflegende Person mit der Position einverstanden ist. Überprüfen Sie Kopf und Füße nochmals auf eine gute Positionierung.

**Um die zu pflegende Person wieder in die Ausgangsposition zu bringen, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:** Die Pflegeperson greift mit einer Hand an die Schulter der zu pflegenden Person und mit der anderen Hand an den Kreuz- und Steißbeinbereich. Die zu pflegende Person kann über die Drehung wieder in die Rückenlage gebracht werden. Vergewissern Sie sich erneut, ob die zu pflegende Person bequem liegt.

Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.

DEKUBITUSTHERAPIE UND  
PATIENTENPOSITIONIERUNG MIT SYSTEM



Überreicht durch:

**POSIMED®**

- POSITIONIERUNGSKISSEN -

Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung  
durch Entlastungslagerung

Zur Dekubitusprophylaxe  
und -therapie

Bezug einfach zu desinfizieren

# POSIMED®

Positionierungskissen

**5** JAHRE  
GARANTIE <sup>\*1</sup>

Kissen:

- Waschbar bis 60°C
- Autoklavierbar
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig\*<sup>2</sup>
- Zur Desinfektion mit Chlor geeignet\*<sup>2</sup>

Biokompatibel

Wasserdampfdurchlässiger  
Inkontinenzbezug gewährleistet  
ein hervorragendes Mikroklima

Kügelchenfüllung sorgt für:

- Schnelle Anpassung an die Körperkontur
- Optimale Druckentlastung



Art. - Name	Größe Länge x Breite	Art. - Nr.
Fersenschiene	39 x 21	PO-FERS3921
Unterarmschiene	39 x 21	PO-UNTE3921
Spreizkissen	60 x 35	PO-SPRE6035
Hüftspreizkissen	35 x 28	PO-HÜFT3528
Halbkreis	137 x 80	PO-HALB1378

Die POSIMED®-Positionierungskissen sind in vielen verschiedenen Formen und Größen erhältlich.



Autoklavierbar




Bezugsmaterial viren- und bakterien-dicht gem. ASTM 1670 + 1671



Wasserdicht dennoch atmungsaktiv



Druckentlastung durch Entlastungslagerung

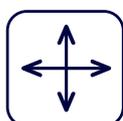

Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte



CE-Kennzeichnung MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer entflammbar DIN EN 597 (1+2)



Leicht zu reinigen durch Wischdesinfektion



Max. 5000 ppm

\*<sup>1</sup> Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften (Pro-Rata-Garantie)!

\*<sup>2</sup> Details siehe Gebrauchsanweisung.


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
DEKUBITUSTHERAPIE MIT SYSTEM



Symbolbild



HILFSMITTELNUMMER  
11.11.05.0036

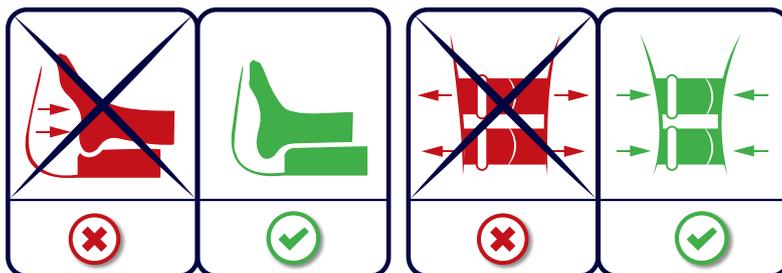

**POSIMED®**  
**HEEL PROTECT®**

Fersenfreilagerungsschuh

**1 JAHR GARANTIE\***

\*1


Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Therapie  
des diabetischen Fußes

Zur Dekubitusprophylaxe  
und -therapie

Bezug einfach zu desinfizieren

HMV-Nr.  
11.11.05.0036

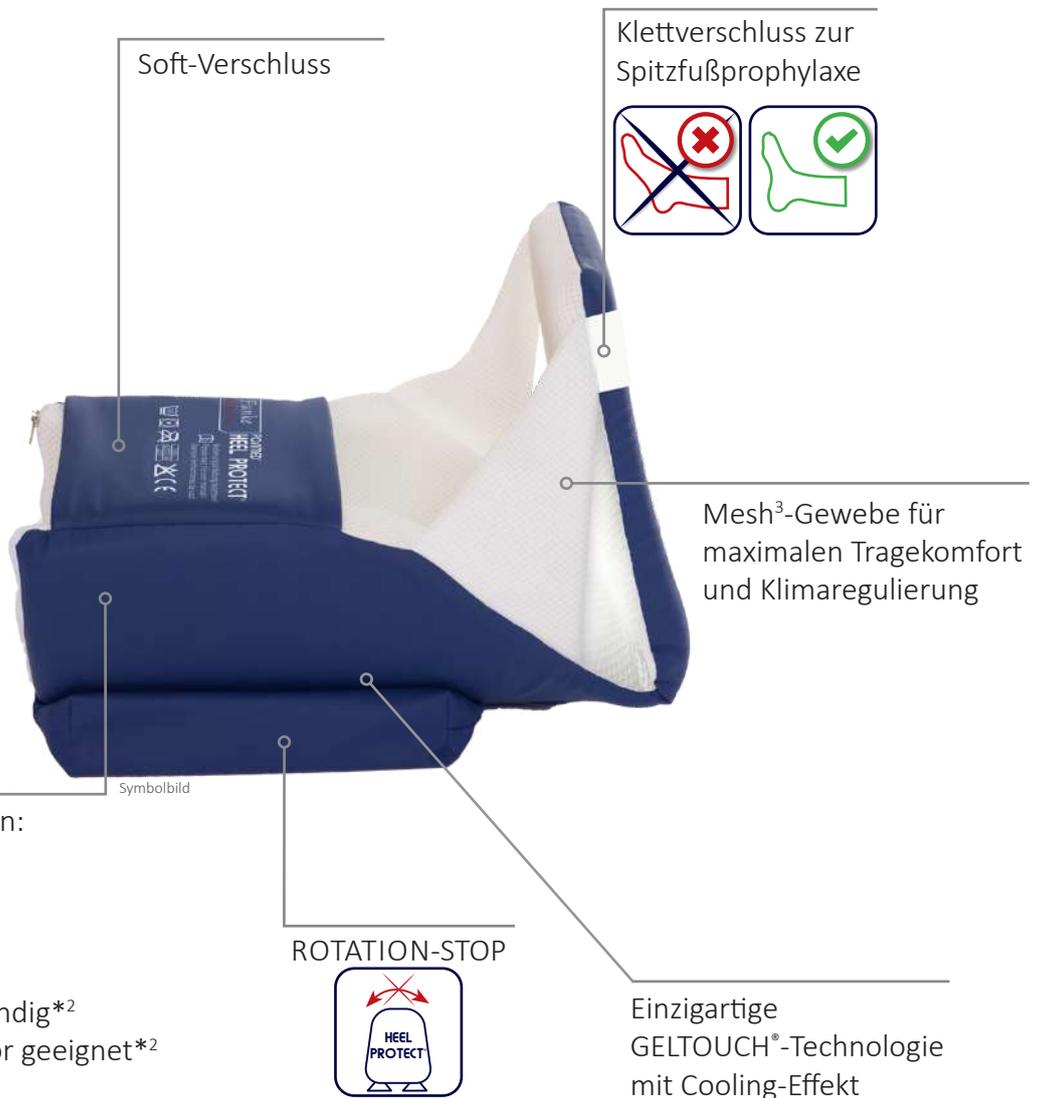

Bezug leicht zu desinfizieren:


- Waschbar bis 95°C
- Trocknergeeignet
- Autoklavierbar
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig\*<sup>2</sup>
- Zur Desinfektion mit Chlor geeignet\*<sup>2</sup>

Größe Art. - Nr.  
ONE SIZE FITS ALL PO-HEELPR



\*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften (Pro-Rata-Garantie)!  
\*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

## UMLAGERUNG MIT SYSTEM

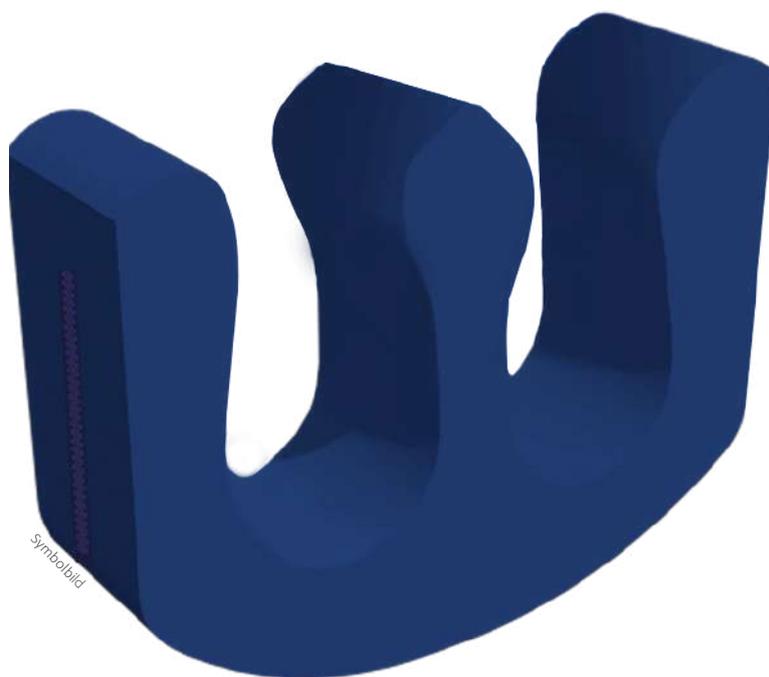

**MobiTurn**<sup>®</sup>

UMLAGER-/WENDEHILFE  
FÜR IMMOBILE PATIENTEN

Überreicht durch:



Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Ermöglicht rücken- und  
kräfteschonendes Arbeiten

Bezug einfach zu desinfizieren

# MobiTurn®

Umlager- und Wendehilfe  
für immobile Patienten


**2** JAHRE  
GARANTIE

\*1

Bezug:

- Abnehmbar
- Waschbar bis 95 °C
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig\*<sup>2</sup>
- Zur Desinfektion mit Chlor geeignet\*<sup>2</sup>
- Autoklavierbar

Ultraschall verschweißte  
Nähte

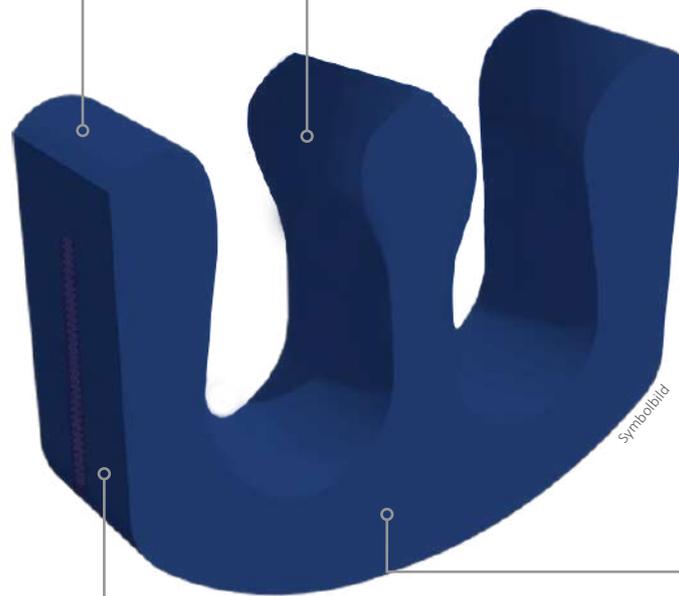

Kern: PU-Schaumstoff

Anwendungsbereiche:


- Ergonomische Form sorgt für eine optimale Patientenumlagerung
- Aufbau ermöglicht eine sichere und schmerzfreie Patientendrehung
- Rückengerechtes und kräfteschonendes Arbeiten für Pflegekräfte und pflegende Angehörige



Bezugsmaterial  
viren- und  
bakteriendicht  
gem. ASTM  
1670 + 1671



Wasserdicht  
dennoch  
atmungsaktiv

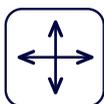

Bi-elastischer  
Bezug zur  
Minimierung  
der Scherkräfte



CE- Kennzeichnung  
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer-  
entflammbar  
DIN EN 597 (1+2)



Autoklavierbar



Leicht zu  
reinigen durch  
Wischdesinfektion



Max. 5000 ppm



Rückengerecht  
und kräfteschonend



Patientengewicht:  
0 bis 250 kg




Einfache  
Patientendrehung

\*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften (Pro-Rata-Garantie)!

\*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.



Mit der Umlager-/Wendehilfe MobiTurn® können zu pflegende Personen sicher und schmerzfreier im Bett von der Rückenlage in die Seitenlage gebracht werden. Das Umlagern durch die Pflegekraft wird vereinfacht und somit ein rückengerechtes und kräfteschonendes Arbeiten ermöglicht. Zudem muss bei der Anwendung des Hilfsmittels die individuelle Situation und mögliche Erkrankungen berücksichtigt werden. Bei aufkommenden Fragen, sollte Rücksprache mit dem behandelnden Arzt gehalten werden.

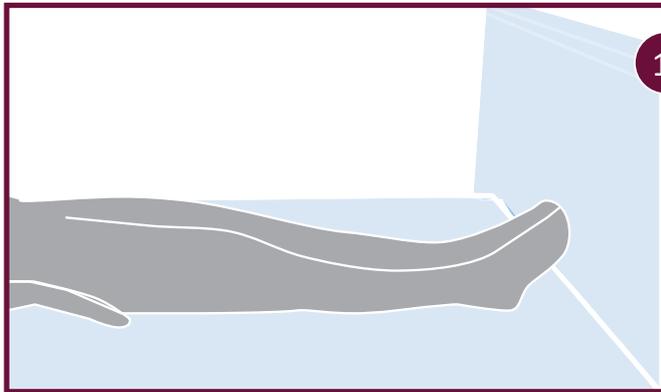

1.

Die zu pflegende Person befindet sich in der Rückenlage flach im Bett. Bitte beachten Sie, dass sich die zu pflegende Person nicht zu nah an der Bettkante befindet, ggf. sollte das vorhandene Bettgitter an der Seite, zu der die zu pflegende Person gedreht werden soll, hochgestellt werden. Dadurch wird das Rausfallen bei der Drehung vermieden.



2.



Die Beine der zu pflegenden Person werden von der Pflegekraft angehoben und das MobiTurn® wird flach unter die Beine gelegt.



3.

Die Beine der zu pflegenden Person müssen gerade in die Aussparungen der Umlager-/Wendehilfe MobiTurn® gelegt werden.



4.

Im nächsten Schritt wird das MobiTurn® aufgestellt. Das MobiTurn® sollte sich im Bereich der Knie der zu pflegenden Person befinden.




5.

Nun wird die zu pflegende Person zum Wenden vorbereitet. Der Arm, welcher von der gewünschten Lagerungsrichtung abgewandt ist, wird auf den Bauch der zu pflegenden Person gelegt. Der andere Arm, welcher sich auf der Lagerungsseite befindet, wird im 90°-Winkel kopfwärts gelagert.



6.


Die Pflegekraft platziert eine Hand am MobiTurn® und eine Hand an der Schulter der zu pflegenden Person, um sie möglichst schonend in die Seitenlagerung zu bringen.

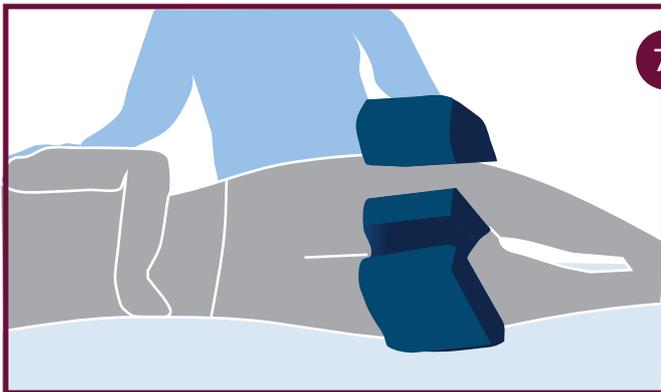

7.

Die zu pflegende Person befindet sich nun in der Seitenlagerung. Nach Stabilisierung der zu pflegenden Person muss die Umlager-/Wendehilfe MobiTurn® entfernt werden.

Falls nur eine kurzzeitige Behandlung in der Seitenlage erfolgen soll, wird die Umlager-/Wendehilfe erst entfernt, wenn die zu pflegende Person nach der Behandlung wieder in die Rückenlage gebracht wurde.

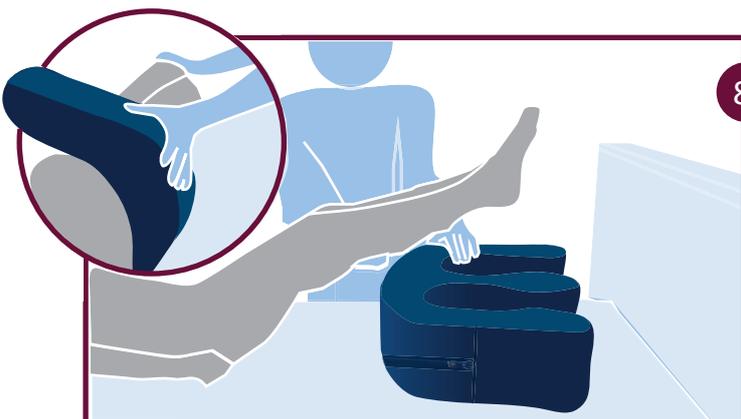

8.

Um die zu pflegende Person wieder in die Rückenlage zu bringen, platziert die Pflegekraft eine Hand am MobiTurn® im Bereich der Kniebeuge und eine Hand an der Schulter der zu pflegenden Person und dreht sie auf den Rücken zurück.

Um das MobiTurn® zu entfernen, wird es in Richtung Bettende gekippt, sodass es flach auf der Matratze liegt. Die Beine der zu pflegenden Person werden angehoben und das MobiTurn® kann entfernt werden.



# SERVICES



Weißer Seiten dienen der korrekten Ausgabe beim Druck.



# Services



## KOMPETENTE BERATUNG

Sicherlich gibt es immer wieder Fragen, die Sie gerne mit uns persönlich am Telefon oder bei Ihnen vor Ort klären möchten. Zu diesem Zweck steht Ihnen ein hochqualifiziertes Beratungsteam aus den Bereichen Medizin, Technik, Finanzen und Regulatory Affairs zur Verfügung.

Tel.: +49 (0)2865 266 93 50 | E-Mail: [info@funke-medical.de](mailto:info@funke-medical.de)



## FAQ

In unserem FAQ beantworten wir Ihnen die häufigst gestellten Fragen.

Mehr Informationen dazu finden Sie auf Seite 55.



## KOSTENFREIE SCHULUNGEN

Qualifizierte Mitarbeiter sorgen für eine erfolgreiche Dekubitusprophylaxe und-therapie. Die Funke Medical Academy bietet kostenfrei, MDR-konforme Zertifikatskurse zur Dekubitustherapie an.

Fordern sie Ihre Zugangsdaten einfach per E-Mail an.

Mehr Informationen dazu finden Sie auf Seite 53.



## AUFRECHTERHALTUNG DES QUALITÄTSSTANDARDS

Alle unsere Medizinprodukte entsprechen den höchsten Qualitätsstandards und sind gemäß der MDR zertifiziert. Dies gewährleistet eine bessere Patientenversorgung und bietet Ihnen Rechtssicherheit bei der Verwendung unserer Produkte.



# Services

## STÄRKUNG DER NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Lippenbekenntnis. Um unserer gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung gerecht zu werden, sind wir ständig im Begriff unsere Produktion und Produkte nachhaltiger aufzustellen.

Mehr Informationen dazu finden Sie auf Seite 8.

## LIEFERSERVICE

Wir liefern unsere Produkte **frei Haus** und somit kostenfrei an Ihre gewünschte Adresse. Auf Anfrage liefern wir auch gerne **frei Verwendungsstelle**, sodass die Matratze direkt an den von Ihnen gewünschten Ort verbracht wird.

## GARANTIE DER LIEFERFÄHIGKEIT

Eine gesicherte Lieferkette mit kurzen Lieferzeiten spielt im medizinischen Bereich eine besonders wichtige Rolle. Um dies abbilden zu können, produzieren wir ausschließlich in Deutschland mit einer Kapazität von 1.200 Matratzen am Tag. Zusätzlich verfügen wir über ein sehr großes Fertigwarenlager, um Spitzen im Auftragseingang abfedern zu können.

## REFERENZEN

Wir haben viel Erfahrung im Altenheim- und Klinikmarkt und betreuen bereits 1.300 zufriedene Kunden in Deutschland und weltweit (34 Länder). Wir informieren Sie gerne in einem persönlichen Gespräch über unsere langjährige Erfahrung bei der Versorgung von in- und ausländischen Kliniken mit unseren hochwertigen Dekubitustherapie-Systemen.





Kostenlos!

# Funke Medical Academy

*Bleiben Sie auf dem neuesten Stand!*



Module abarbeiten



Test bestehen



Zertifikat erhalten



Fertig!

[academy.funke-medical.de](https://academy.funke-medical.de)



HEALTH:ANGEL  
**GEWINNER**  
- 2019 -

„Digitale Weiterbildung im Gesundheitswesen“



24 Stunden  
Weltweit  
Alle Geräte





# Funke Medical Academy

*Bleiben Sie auf dem neuesten Stand!*

**Nach nationalen und internationalen Gesetzgebungen sind alle Berufsgruppen im Gesundheitswesen verpflichtet sich regelmäßig weiterzubilden.**

Die E-Academy der Funke Medical GmbH bietet diese erforderlichen Fortbildungen als Zertifikatkurse online an.

- Sie können sich **kostenfrei** weiterbilden.
- Alle Fortbildungen sind auf dem **neuesten Stand** der wissenschaftlichen Erkenntnisse.
- Alle Inhalte werden **permanent aktualisiert**.
- Alle Kurse sind von **Pädagogen** mit wissenschaftlichem Hintergrund entwickelt worden.
- Die Funke Medical E-Academy ist und bleibt **kostenlos**.



## Wie funktioniert's?

Sie erhalten von der Funke Medical GmbH einen, Registrierungsschlüssel und einen Einschreibeschlüssel.

Mit diesen Schlüsseln können Sie und Ihre Mitarbeiter sich unter

**academy.funke-medical.de**

erfolgreich registrieren und einloggen.

Nach Abarbeiten der Schulungen und erfolgreicher Durchführung der Online-Tests erhalten Sie umgehend ein **Zertifikat**, welches zur Vorlage und als Nachweis genutzt werden kann.



„Wir haben Wettbewerb schon lange im Haus,  
warum sollten wir wechseln?“

**WIR SIND:**

- ▶ Zugelassener Hersteller von CE-gekennzeichneten Medizinprodukten im Sinne der MDR 2017/745
- ▶ Marktführer im Bereich Dekubitusprophylaxe und-therapie in der häuslichen Pflege in Deutschland

**WIR BIETEN:**

- ▶ Top-Qualität zum vernünftigen Preis (keine Handelsstufen)
- ▶ Medizinische Evidenzen
- ▶ Viel Erfahrung im internationalen Klinikmarkt (Referenzliste)
- ▶ Eigene Produktentwicklung mit hochqualifiziertem, eigenem Personal
- ▶ MDR-konforme Produkte gewährleisten Rechtssicherheit und Rückverfolgbarkeit
- ▶ Gesicherte Lieferkette: Produktion in Deutschland, hohe Lagerkapazität
- ▶ Sehr kurze Lieferzeiten
- ▶ Kostenersparnis durch intelligente Produktion
- ▶ Verbesserung der Nachhaltigkeit durch umweltschonende Produkte
- ▶ Kompetente medizinische und technische Beratung
- ▶ Kostenlose Weiterbildungsmöglichkeiten

**ÄRZTLICHER DIREKTOR / HYGIENE**

Welche Zertifikate hat die Funke Medical GmbH?

- ▶ • CE-Kennzeichnung
- Klinische Bewertung nach MEDDEV 2.7.1
- QM nach ISO 13485
- Laborstudien: Mikroklima und Druckentlastung, Schwerentflammbarkeit, Biokompatibilität

Wie kann man den Matratzenkern reinigen?

- ▶ Per Autoklav (mindestens 50 Minuten bei 105°C)

Leidet der Schaum beim Autoklavieren?

- ▶ Nein, dazu haben wir eine kleine Teststudie gemacht, die das Gegenteil beweist.

**ÄRZTLICHER DIREKTOR / HYGIENE**

Wie kann der Bezug gereinigt werden?

- ▶ Der Bezug kann bei 95°C gewaschen werden oder durch Wischdesinfektion gemäß der Gebrauchsanweisung gereinigt werden.

Sind die Bezüge vernäht?

- ▶ Nein, diese sind Ultraschall verschweißt. (Viren- und bakterien dicht nach ASTM 1670+1671)



## PFLEGEDIENSTLEITUNG

**Ist die Matratze wirklich bis zum ausgelobten Grad einsetzbar?**

- ▶ Ja, denn dafür gibt es unabhängige Prüfverfahren und klinische Bewertungen, die das bestätigen.

**Ist Viskoschaum das Beste?**

- ▶ Das ist ein Werbemythos ohne klinische Evidenz. Fakt ist, dass Viskoschaum geschlossenporig ist und das Mikroklima negativ beeinflusst. Das hat dann natürlich direkten Einfluss auf die Begünstigung eines Dekubitus. Auch die Behauptung, dass Viskoschaum eine bessere Druckentlastung böte, ist technisch nicht messbar und somit unwahr. Es gibt Schäume mit deutlich besseren Messergebnissen.

**Wie kann ein virendichter Bezug atmungsaktiv sein?**

- ▶ Das PU-Laminat ist eine semipermeable Membran.

**Erhöht ein höheres Raumgewicht (Dichte) die Haltbarkeit?**

- ▶ Das ist ein Mythos, der auf die modernen Rohstoffe im 21. Jahrhundert nicht zutrifft. Es gibt Prüfverfahren, die das deutlich widerlegen.

**Sind die Matratzen auch für Schwerlastpatienten geeignet?**

- ▶ Ja, der Standard ist 140 – 150kg, aber wir haben auch Matratzen mit bis zu 250kg Patientengewicht (z.B.: MAXX 250 *clinic* GREENLINE).

## EINKAUF

**Bieten Sie auch alternative Zahlungsmodalitäten (Leasing, Mietkauf) an?**

- ▶ Ja, wir bieten das Leasing-Modell an.

**Ist „Made in Germany / Europe“ zu teuer?**

- ▶ Den Gegenbeweis treten wir bei gleicher Qualität gerne an!

**Liefern Sie frei Haus?**

- ▶ Ja.

**Liefern Sie frei Verwendungsstelle?**

- ▶ Ja, gegen Aufpreis.

**Haben die Matratzen eine Garantie?**

- ▶ Ja, je nach Modell zwischen 3 – 7 Jahre auf die funktionalen Eigenschaften des Matratzenkerns.

**Bieten Sie auch kostenlose Tests an?**

- ▶ Ja, selbstverständlich.

**EINKAUF / QUALITÄTSMANAGEMENT**

Welche Referenzen kann die Funke Medical GmbH vorweisen?

- ▶ Die Referenzliste kann gerne angefragt werden.

Welche Zertifikate hat die Funke Medical GmbH?

- ▶ • CE-Kennzeichnung
- ▶ • Kinische Bewertung nach MEDDEV 2.7.1
- ▶ • QM nach ISO 13485
- ▶ • Laborstudien: Mikroklima und Druckentlastung, Schwerentflammbarkeit, Biokompatibilität

Was ist Ihre meistverkaufte Matratze?

- ▶ Hyper Foam 2- mehr als 1.000.000 Stück!

Was sind Ihre Kapazitäten?

- ▶ Wir haben eine Kapazität von ca. 1.200 Matratzen pro Tag.

Wie lang sind die Lieferzeiten?

- ▶ Bei kleineren Mengen 48 Stunden bei Lagerware, bei größeren Mengen 14 Tage nach dem Auftragseingang.

**BETTENZENTRALE**

Gibt es zum Handling der Matratzen auch die Ausstattung mit Griffen?

- ▶ Ja, allerdings sind diese angenäht, was technisch auch nicht anders geht.

Wie oft sind die Matratzenkerne reinigungsfähig / autoklavierbar?

- ▶ Mindestens 100 Mal

Wie oft kann man die Bezüge gemäß der Vorgaben der Gebrauchsanweisung waschen?

- ▶ Mindestens 100 Mal

Falls Sie noch weitere Fragen zu unseren Produkten oder zu unserem Service haben, melden Sie sich gerne unter

+49 (0)2865 266 93 50 | [info@funke-medical.de](mailto:info@funke-medical.de)

# linikmatratze.de

Über unsere Funke Medical Social-Media-Kanäle  
verpassen Sie keine unserer Neuigkeiten mehr:

